

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PA01-003	スリットリフト	1本	2		φ22mm用
2	X-WH26-002L	OS-TR用 背折れ金具セット(左)	1個	1		オレンジ色
2	X-WH26-002R	OS-TR用 背折れ金具セット(右)	1個	1		オレンジ色
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキパッド【Aタイプ】(左)	1個	1		「APSE」型
3	X-PB04-001R	制動用ブレーキパッド【Aタイプ】(右)	1個	1		「APSE」型
4	X-WH26-040L	握りパッド(左) グレー	1個	1		「APSE」型
4	X-WH26-040R	握りパッド(右) グレー	1個	1		「APSE」型
5	X-PB04-004	パッド用スペーサーキャップ	1個	2		左右共通
6	X-PA92-024	【リクライニング】細長シール	1枚	2		灰色
7	X-PA03-022	M8×15 ノット	1個	2		
8	X-WH26-008	OS-TR用 外側パッド用押しプレート	1枚	2		
9	X-WH26-009	OS-TR用 縮み止め 380幅用	1本	1		
9	X-WH26-029	OS-TR用 縮み止め 400幅用	1本	1		
9	X-WH26-039	OS-TR用 縮み止め 420幅用	1本	1		
10	X-PA92-013	手を挟まないでくださいシール	1枚	1 or 2		
11	X-WH26-011	折りたたみ式縮み止め用ノット	1個	1 or 2		オレンジ色
12	X-WH26-012	OS-TR用 前折れジョイント支点ノットセット	1本	2		ボジティブ仕様
13	X-WH26-013L	OS-TR用 前折れジョイントパッドセット(左)	1個	1		ボジティブ仕様
13	X-WH26-013R	OS-TR用 前折れジョイントパッドセット(右)	1個	1		ボジティブ仕様
14	X-WH26-014	OS-TR用 前折れジョイントパッド&ワイヤセット 380幅用	1本	1		
14	X-WH26-024	OS-TR用 前折れジョイントパッド&ワイヤセット 400幅用	1本	1		
14	X-WH26-034	OS-TR用 前折れジョイントパッド&ワイヤセット 420幅用	1本	1		
15	X-WH26-015	ワイヤ LC01	1本	2 or 4		No. LC01 850mm、7mm管付
16	X-WH26-016	ワイヤ LC02	1本	0 or 2		No. LC02 910mm、7mm管付

機種名/品名

オアシス バックサポート部

区分


XTC-WH26

背折れタイプ

対象機種  
OS-12TR/11TRS/12TRS

前折れジョイントタイプ

対象機種  
OS-11TRSP/12TRSP

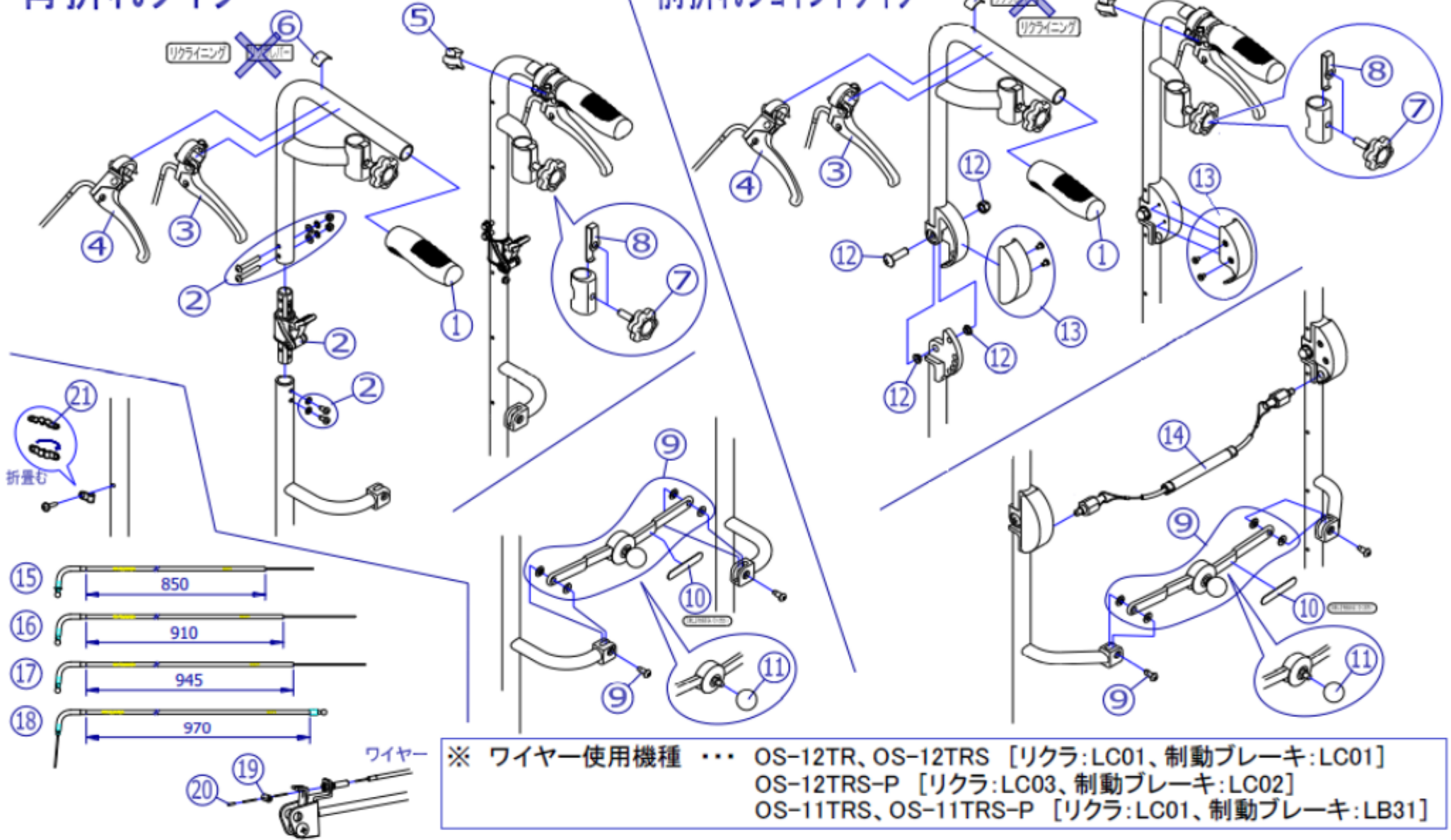

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
17	X-WH26-017	ワイヤ LC03	1本	0 or 2		No. LC03 945mm、7股管付
18	X-WH26-018	ワイヤ LB31	1本	0 or 2		No. LB31 970mm
19	X-PA04-011	真ちゅうワイヤ止め金具	1個	2		
20	X-PB04-009	ワイヤ先端7股管	1個	2		
21	X-PA04-016	ワイヤ案内止め	1個	2		