


⑤保護ゴムキャップは
2019年6月頃販売終了となり
車軸ナットが袋ナットへ変更

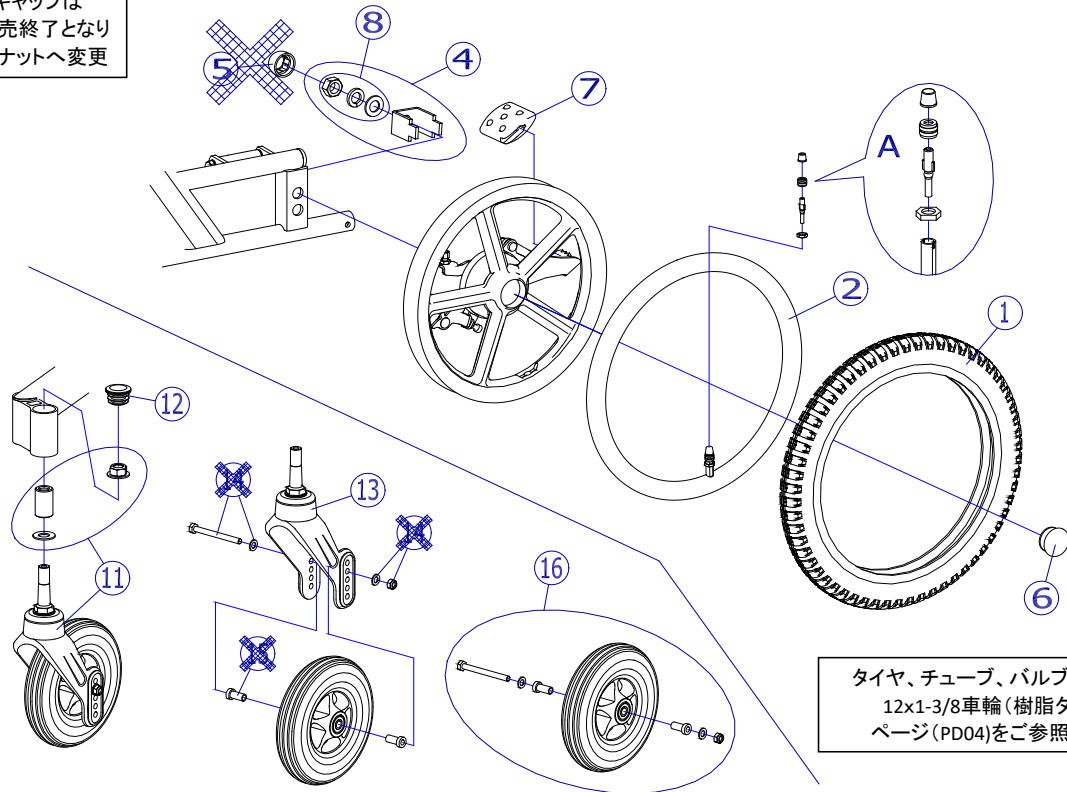

2019/12/11修正H

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		
2	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		
		↑ スーパーバルブセットが附属します。フラップが付属しますが、樹脂ホイールの場合には使用しません					
4	X-PB05-010	ドラロック固定部品セット	1	個	2		
5	X-WH30-018	X-車軸ナット保護ゴムキャップ	4	個	2		販売終了
6	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1	個	2		
7	X-PB03-012	ドラロック用ペダルゴム	1	個	2		オレンジ
	X-PB03-012R	X-ドラロック用ペダルゴム(右)	4	個	=		
		↑ 左右共通品となりました。在庫なくなり次第、左右の指示を頂いても共通品を出荷させていただきます。					
8	X-WC31-017	車輪固定袋ナットセット	1	個	2		黒
		↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、袋ナットの三点セットです。					
11	X-WH42-007	MH-CR3D用 6インチPUアジャスタブルキャスタ完成	1	個	2		
		↑ 固定用のナット類が付属します。					
12	X-WH42-006	MH-CR3D用 キャスタケースキャップ	1	個	2		
13	X-PC11-004	ショートシャフト式 アジャスタブルフォーク	1	個	2		
14	X-PC05-024	X-6インチPUキャスタ輪アジャスタブル用ボルトセット	4	本	2		販売終了
		↑ ボルト1本(M6×67)、ワッシャー2枚、ナット1個					
15	X-PC05-019	X-6インチPUキャスタ輪用カラー(2個セット)	4	個	2		販売終了
16	X-PC05-025	6インチPUキャスタ輪(アジャスタブル用ボルト付セット)	1	個	2		⑭⑮付
		<p>2018/10頃から ナット+ワッシャー ↓ フランジ付きナット 変更(互換性有)</p>					

注記