


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
-	X-PD08-002	18×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
-	X-PD08-005	18×1-3/8 チューブ+フラスコシート	1本	2		スハ <sup>o</sup> -ハ <sup>o</sup> 脚 <sup>o</sup> 付
-	X-PD08-006	18×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラスコシート	1本	2		スハ <sup>o</sup> -ハ <sup>o</sup> 脚 <sup>o</sup> 付
-	X-PD10-002	20×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
-	X-PD10-005	20×1-3/8 チューブ+フラスコシート	1本	2		スハ <sup>o</sup> -ハ <sup>o</sup> 脚 <sup>o</sup> 付
-	X-PD10-006	20×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラスコシート	1本	2		スハ <sup>o</sup> -ハ <sup>o</sup> 脚 <sup>o</sup> 付
-	X-PD12-002	22×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
-	X-PD12-005	22×1-3/8 チューブ+フラスコシート	1本	2		スハ <sup>o</sup> -ハ <sup>o</sup> 脚 <sup>o</sup> 付
-	X-PD12-006	22×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラスコシート	1本	2		スハ <sup>o</sup> -ハ <sup>o</sup> 脚 <sup>o</sup> 付
-	X-WJ22-014	MKD用 フレキワイヤ	1本	2		
1	---	本体フレーム	---	---		設定無
2	X-WJ21-002L	MKD用 側板シート(左)	1枚	2		リハ <sup>o</sup> 付
2	X-WJ21-002R	MKD用 側板シート(右)	1枚	2		リハ <sup>o</sup> 付
3	X-PA02-007L	17ait7-5mm-10 <sup>o</sup> 付(左)	1本	1		ホ <sup>o</sup> 付
3	X-PA02-007R	17ait7-5mm-10 <sup>o</sup> 付(右)	1本	1		ホ <sup>o</sup> 付
4	X-PA01-101	6分用中柱	1個	2		
5	X-PC02-016	5インチリフトキャスタ Dシート	1個	2		MKD-S/Mの場合
5	X-PC03-016	6インチリフトキャスタ Dシート	1個	2		MKD-Lの場合
6	X-WJ21-006L	MKD用 ミニタカフレキ(加 <sup>o</sup> -水色)(左)	1個	1		リハ <sup>o</sup> -長 170mm。にぎりゴ <sup>o</sup> 付
6	X-WJ21-006R	MKD用 ミニタカフレキ(加 <sup>o</sup> -水色)(右)	1個	1		リハ <sup>o</sup> -長 170mm。にぎりゴ <sup>o</sup> 付
7	X-WJ23-015L	MKD (L)用 フットプレート完成(左)	1枚	1		
7	X-WJ23-015R	MKD (L)用 フットプレート完成(右)	1枚	1		
7	X-WJ23-016L	MKD (M)用 フットプレート完成(左)	1枚	1		
7	X-WJ23-016R	MKD (M)用 フットプレート完成(右)	1枚	1		

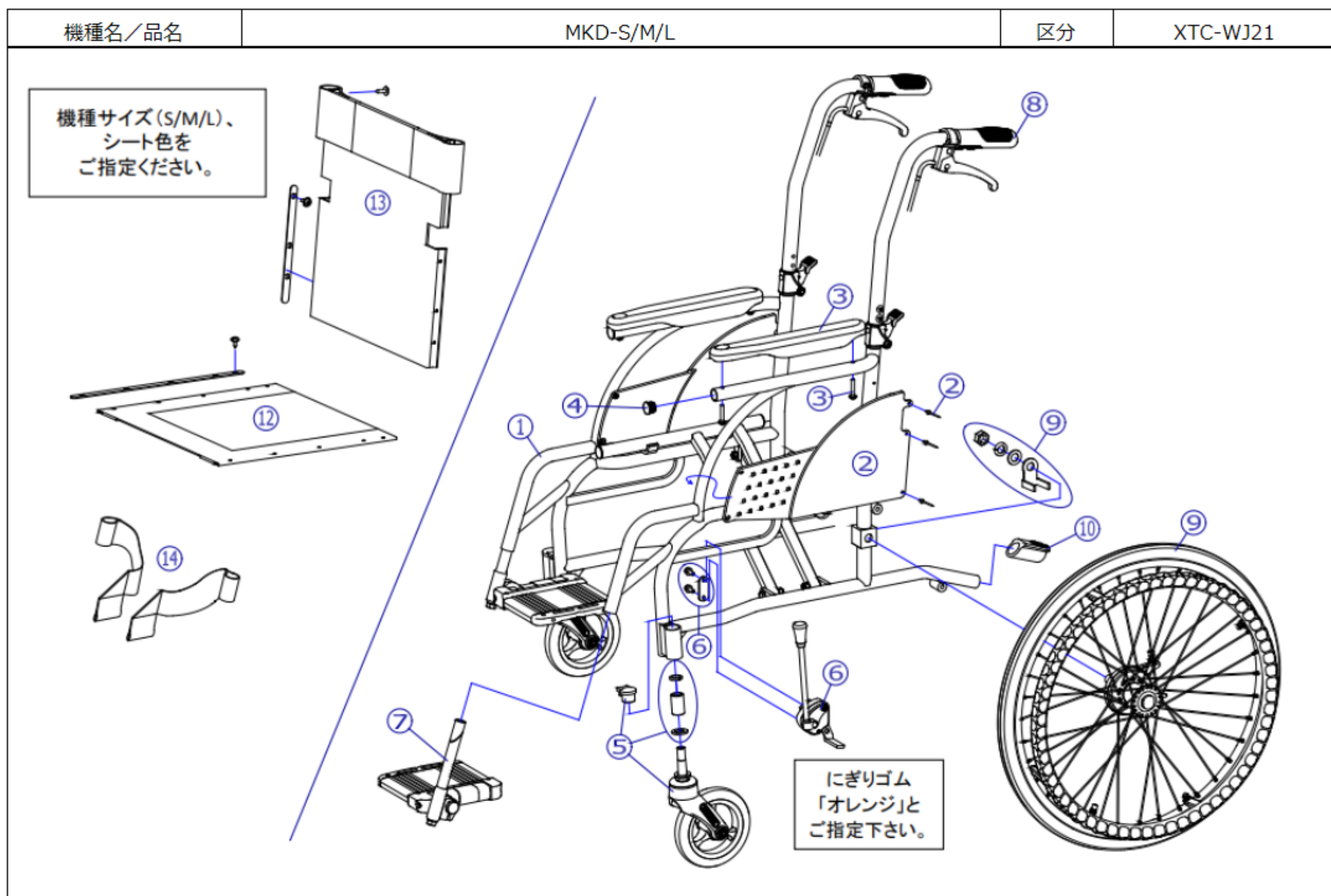

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
7	X-WJ23-017L	MKD (S)用 フットパッド完成(左)	1 枚	1		
7	X-WJ23-017R	MKD (S)用 フットパッド完成(右)	1 枚	1		
8	X-PA01-003	スリットリグ	1 本	2		φ22mm用。接着剤必要
10	X-PA01-014	フィレソングキャップ	1 個	2		
12	X-WJ21-012-28AP3	MKD用 座シート外 280幅 AP-3	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
12	X-WJ21-012-28AP4	MKD用 座シート外 280幅 AP-4	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
12	X-WJ21-012-30AP3	MKD用 座シート外 300幅 AP-3	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
12	X-WJ21-012-30AP4	MKD用 座シート外 300幅 AP-4	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
12	X-WJ21-012-32AP3	MKD用 座シート外 320幅 AP-3	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
12	X-WJ21-012-32AP4	MKD用 座シート外 320幅 AP-4	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
13	X-WJ21-013-28AP3	MKD用 背シート外 280幅 AP-3	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
13	X-WJ21-013-28AP4	MKD用 背シート外 280幅 AP-4	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
13	X-WJ21-013-30AP3	MKD用 背シート外 300幅 AP-3	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
13	X-WJ21-013-30AP4	MKD用 背シート外 300幅 AP-4	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
13	X-WJ21-013-32AP3	MKD用 背シート外 320幅 AP-3	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
13	X-WJ21-013-32AP4	MKD用 背シート外 320幅 AP-4	1 枚	1		芯金、t <sup>o</sup> 付属
14	X-WJ21-014L	MKD用 レッグパッド(左)	1 本	1		
14	X-WJ21-014R	MKD用 レッグパッド(右)	1 本	1		