


※ 機種により締結方法が異なる場合があります。  
(ボルトの種類・長さが違う場合もありますので、各機種ページにてご確認ください。)

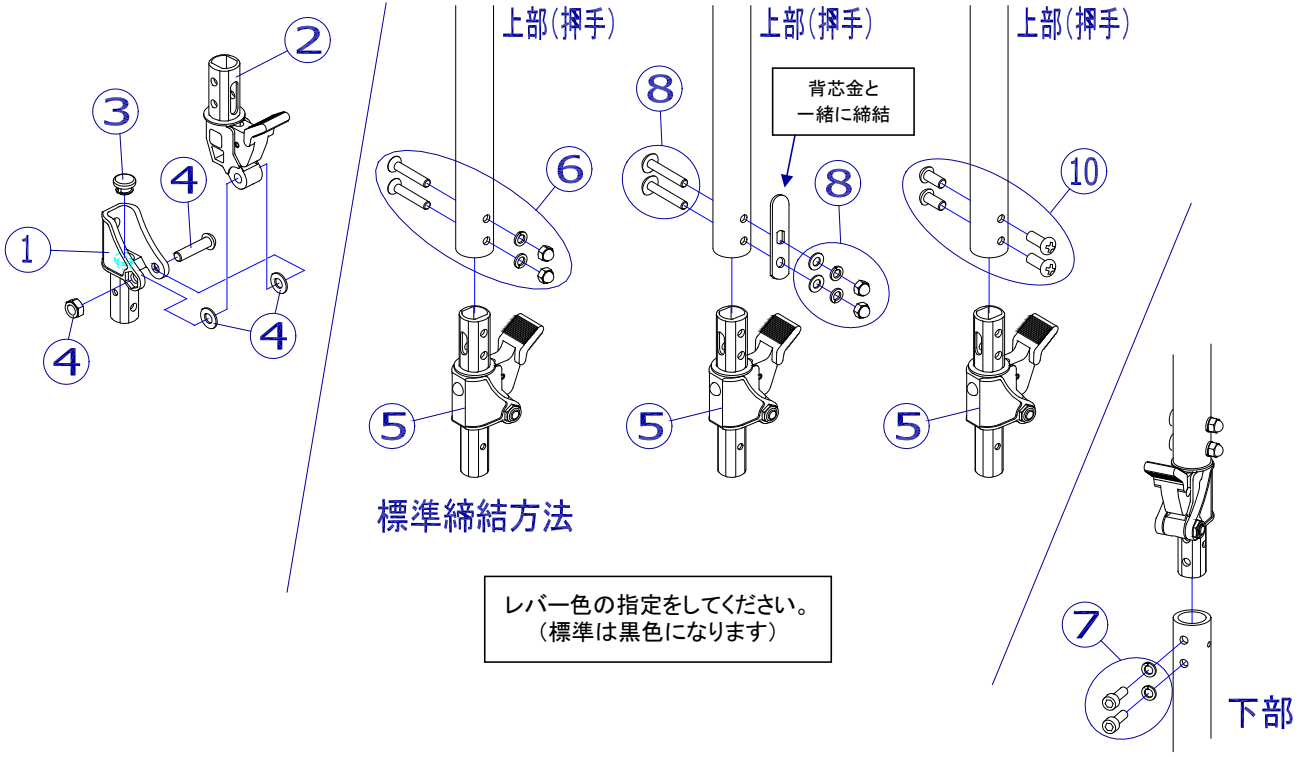

機種名／品名		背折れ金具 (SUS:ステンレスタイプ)				ページ	XTC- PA06B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	背折れ金具 (SUS) 下部	---	---	---	-	設定無	
2	X-PA06-002R	背折れ金具 (SUS) 上部 (右)	1	個	1		黒レバー	
	X-PA06-002L	背折れ金具 (SUS) 上部 (左)	1	個	1			
	X-PA06-012R	背折れ金具 (SUS) 上部 (右) (橙)	1	個	1		オレンジレバー	
	X-PA06-012L	背折れ金具 (SUS) 上部 (左) (橙)	1	個	1			
3	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1	個	2			
4	X-PA06-004	背折れ金具 (SUS) 用 支点ボルトセット	1	本	2			
5	X-PA06-005R	背折れ金具 (SUS) (右)	1	個	1		黒レバー	
	X-PA06-005L	背折れ金具 (SUS) (左)	1	個	1			
	X-PA06-015R	背折れ金具 (SUS) (右) (橙)	1	個	1		オレンジレバー	
	X-PA06-015L	背折れ金具 (SUS) (左) (橙)	1	個	1			
6	X-PA06-006	背折れ金具 (SUS) 上部固定ボルト【A】(2本セット) ↑ M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット	1	個	2		2本セット	
7	X-PA06-007	背折れ金具 (SUS) 下部固定ボルト【C】(2本セット) ↑ M5×15キャップボルト、M5SWのセット	1	個	2		2本セット	
8	X-PA06-008	背折れ金具 (SUS) 上部固定ボルト【E】(2本セット) ↑ M5×35トラスボルト、M5平W、M5SW、M5袋ナットのセット	1	個	2		2本セット	
10	X-PA06-010	背折れ金具 (SUS) 上部固定ボルト【B】(4本セット) ↑ M5×10ナベボルト(特)	1	個	2		4本セット	
注記								