
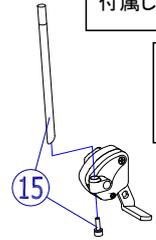


機種名／品名	ミニタックルブレーキ	ページ	XTC- PB02A
--------	------------	-----	------------

ブレーキカバーの色は三種類、ブレーキにぎりゴムの色は二種類あります。ご使用機種をご確認ください。
 ・ミニタックルブレーキ:カバー水色 ・旧OSシース用:カバー紺色(2014年廃盤になりました) ブレーキにぎりゴム④:
 ・ミニFBタックルブレーキ:カバー薄紫色 ・一部機種 タックルブレーキ:カバー黒色 黒またはオレンジ(橙)

④にぎりゴムは付属しません。


標準用
170mm
のみ

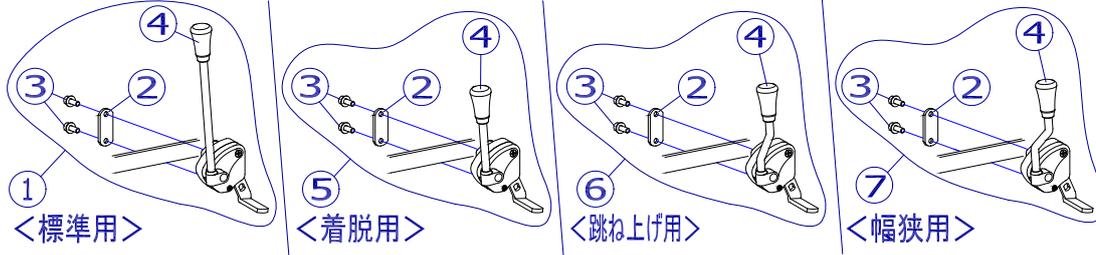

※注意※
⑮ブレーキ棒のみ
交換する場合

ブレーキ棒が曲がったりしている場合は、ブレーキ本体(内部)が破損している可能性があります。必ずブレーキ本体の破損が無いことを確認してください。

なお、外す際は接着剤が付いているため、根元(ボルト)を加熱すると外しやすくなります。

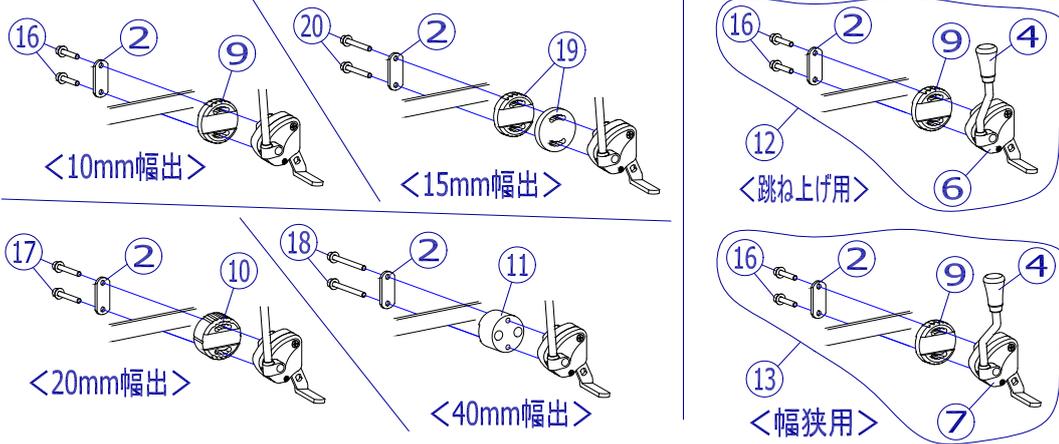

① 2019/4/8修正E

機種名／品名	ミニタックルブレーキ	ページ	XTC- PB02B
--------	------------	-----	------------



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PB02-001L	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 170mm
	X-PB02-001R	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		
	X-PB02-021L	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 170mm
	X-PB02-021R	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		
2	X-PB02-002	ミニタックル固定プレート	1	枚	2		
3	X-PB02-003	ミニタックル固定ボルト(2本セット)	1	個	2		2本セット
4	X-PB02-004	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(黒)	1	個	1		
	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
5	X-PB02-005L	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-005R	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		
	X-PB02-025L	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-025R	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		
	X-PB02-105L	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-105R	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) (右)	1	個	1		にぎりゴム:オレンジ
6	X-PB02-125L	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-125R	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) (右)	1	個	1		にぎりゴム:オレンジ
6	X-PB02-006L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-006R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		
	X-PB02-026L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-026R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		
注記							

ブレーキカバーの色は三種類、ブレーキにぎりゴムの色は二種類あります。ご使用機種をご確認ください。

・ミニタックルブレーキ: カバー水色 ・旧OSシリーズ用: カバー紺色(2014年廃盤になりました) ブレーキにぎりゴム④:
 ・ミニFBタックルブレーキ: カバー薄紫色 ・一部機種 タックルブレーキ: カバー黒色 黒またはオレンジ(橙)

④にぎりゴムは付属しません。


標準用
170mm
のみ

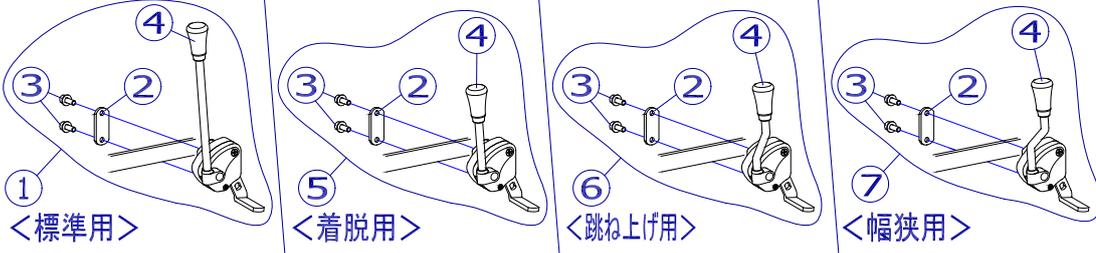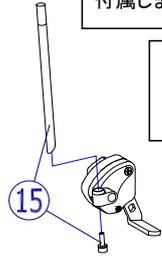

※注意※
⑮ブレーキ棒のみ
交換する場合

ブレーキ棒が曲がったりしている場合は、ブレーキ本体(内部)が破損している可能性があります。必ずブレーキ本体の破損が無いことを確認してください。

なお、外す際は接着剤が付いているため、根元(ボルト)を加熱すると外しやすくなります。

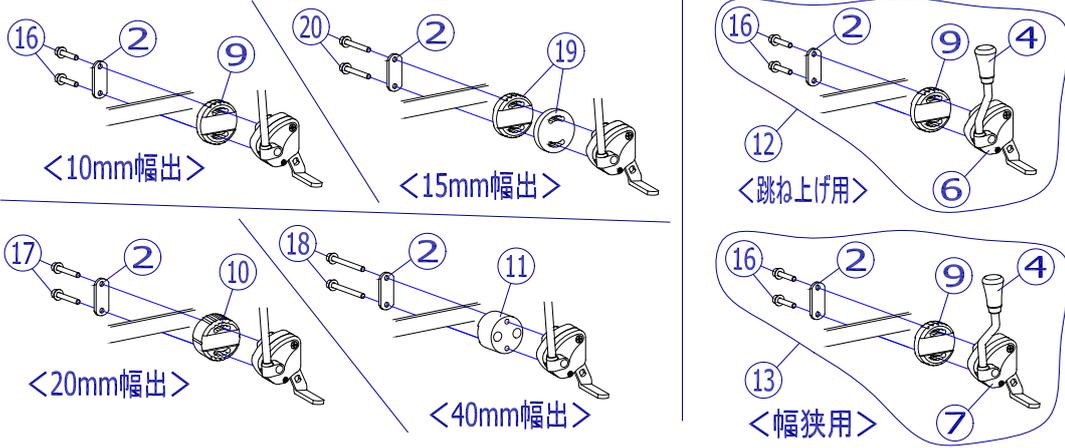

機種名／品名		ミニタックルブレーキ				ページ	XTC- PB02D	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
7	X-PB02-007L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1			レバー長 95mm
	X-PB02-007R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1			
9	X-PB02-009	ミニタックル用 10mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1	個	2			⑯が付属します
10	X-PB02-010	ミニタックル用 20mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1	個	2			⑰が付属します
11	X-PB02-011	ミニタックル用 40mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1	個	2			⑱が付属します
12	X-PB02-012L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) 10mm幅出しセット (左)	1	個	1			にぎりゴム: 黒 ボルト付
	X-PB02-012R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) 10mm幅出しセット (右)	1	個	1			
	X-PB02-022L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) 10mm幅出しセット (左)	1	個	1			
	X-PB02-022R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) 10mm幅出しセット (右)	1	個	1			にぎりゴム: 橙 ボルト付
	X-PB02-112L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) 10mm幅出しセット (左)	1	個	1			
	X-PB02-112R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) 10mm幅出しセット (右)	1	個	1			
	X-PB02-122L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) 10mm幅出しセット (左)	1	個	1			
X-PB02-122R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) 10mm幅出しセット (右)	1	個	1				
13	X-PB02-013L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) 10mm幅出しセット (左)	1	個	1			
	X-PB02-013R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) 10mm幅出しセット (右)	1	個	1			
15	X-PB02-015	ミニタックル用 標準ブレーキ棒のみ(ボルト付)	1	本	2			170mm用
16	X-PB02-016	ミニタックル固定ボルト 10mm幅出用(2本セット)	1	個	2			2本セット
17	X-PB02-017	ミニタックル固定ボルト 20mm幅出用(2本セット)	1	個	2			2本セット
18	X-PB02-018	ミニタックル固定ボルト 40mm幅出用(2本セット)	1	個	2			2本セット
19	X-PB02-019	ミニタックル用 15mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1	個	2			⑳が付属します
20	X-PB02-020	ミニタックル固定ボルト 15mm幅出用(2本セット)	1	個	2			2本セット
注記								