
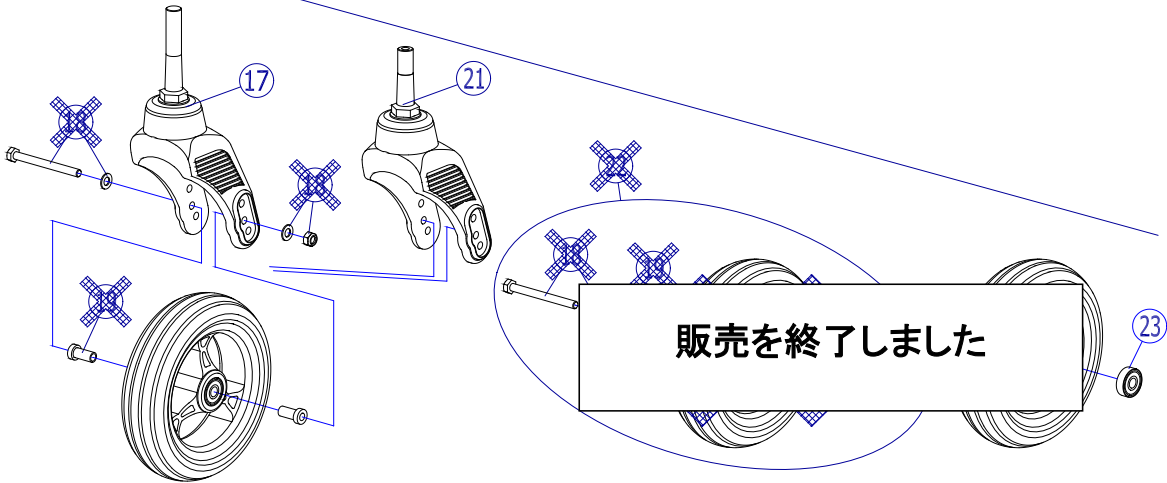


パッキン部分などの部品は、「6インチソリッドキャスト」ページ【PC03】をご参照ください。

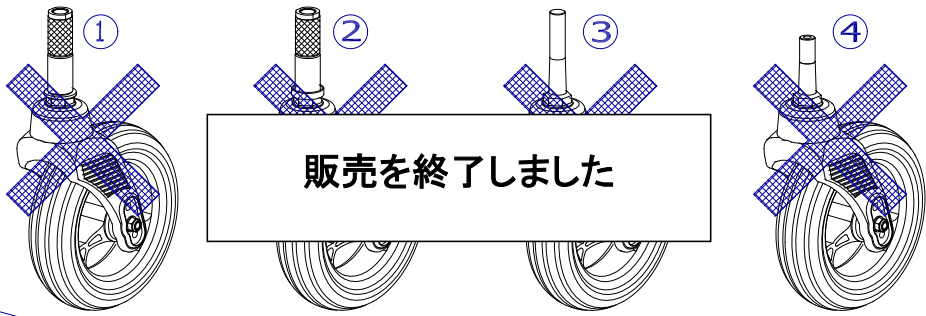

2019/12/16修正C

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PC09-001	X-平Wパッキン式 6インチワイドキャスト	1	個	2		
2	X-PC09-002	X-おわんパッキン式 6インチワイドキャスト	1	個	2		
3	X-PC09-003	X-シャフト式 6インチワイドキャスト	1	個	2		
4	X-PC09-004	X-ショートシャフト式 6インチワイドキャスト	1	個	2		
17	X-PC08-017	シャフト式 ワイドフォーク ↑ ※ワイドフォークは、5、6、7インチ共通です。	1	個	2		
18	X-PC02-028	X-キャスト輪用ボルトセット M6×67 ↑ ボルト1本(M6×67)、ワッシャー2枚、ナット1個	1	本	2		販売終了
19	X-PC08-019	X-ワイドキャスト輪用カラー(2個セット)	1	個	2		販売終了
21	X-PC08-021	ショートシャフト式 ワイドフォーク ↑ ※ワイドフォークは、5、6、7インチ共通です。	1	個	2		
22	X-PC09-022	X-6インチワイドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		(18)、(19)、(20)のセット
23	X-PC01-023	キャスト輪用ベアリング ↑ 一輪に2個必要です。	1	個	4		608ZZ

注記