


2019年12月頃～
 ドラムブレーキの仕様が
 変更となります。(互換性あり)
 タイプ【2B-A】【2B-B】
 ⇒ タイプ【2N-B】へ統合

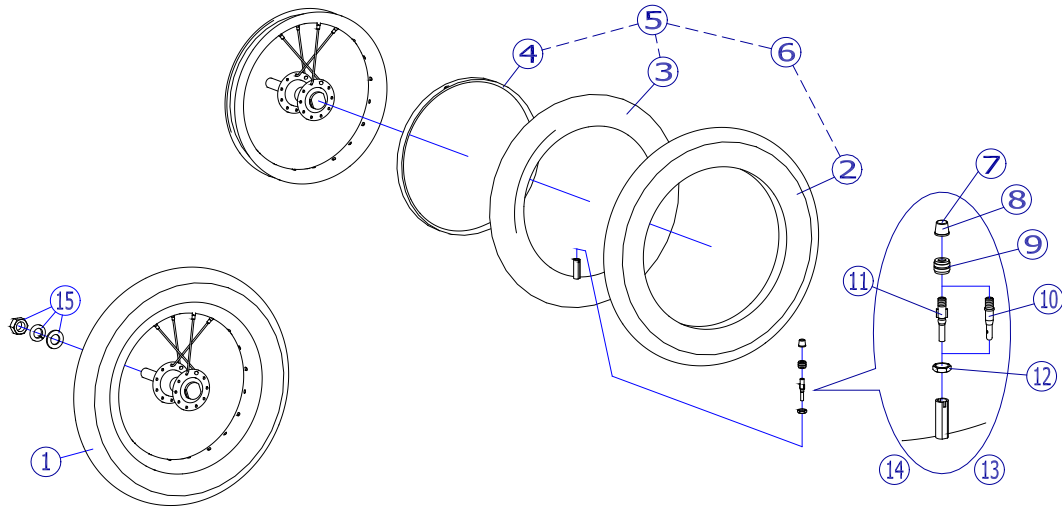

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

機種名/品名		12×1/2×2-1/4 車輪				ページ	XTC- PD02B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD02-001	12×1/2×2-1/4 車輪完成	1	本	2		
		↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。					
	X-PD02-021L-2BB	12×1/2×2-1/4 ドラム車輪完成 タイプ2B-B (左)	1	本	1		ワイヤー無 ドラムハブ固定方法は 【PD01】をご参照下さい。
	X-PD02-021R-2BB	12×1/2×2-1/4 ドラム車輪完成 タイプ2B-B (右)	1	本	1		
	X-PD02-021L-2NB	12×1/2×2-1/4 ドラム車輪完成 タイプ2N-B (左)	1	本	1		
X-PD02-021R-2NB	12×1/2×2-1/4 ドラム車輪完成 タイプ2N-B (右)	1	本	1			
		↑ 固定部品(ナットなど)が付属します。					
2	X-PD02-002	12×1/2×2-1/4 タイヤのみ	1	本	2		
3	X-PD02-003	12×1/2×2-1/4 チューブのみ	-	-	-		設定無
4	X-PD02-004	12×1/2×2-1/4 フラップのみ	1	本	2		
5	X-PD02-005	12×1/2×2-1/4 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、④のセット
		↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。					
	X-PD02-095	12×1/2×2-1/4 チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		③、④のセット
		↑ ⑭虫ゴムセットが付属します。					
6	X-PD02-006	12×1/2×2-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、④のセット
		↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。					
	X-PD02-096	12×1/2×2-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		②、③、④のセット
		↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。					
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		⑦キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		⑧キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1	個	2		
		↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。					
注記							