


機種名/品名	12×1-3/8 車輪(スポークタイプ)	ページ	XTC- PD03A
--------	----------------------	-----	------------

機種により仕様が異なります。機種名をご確認ください。
USLシリーズは【WB06】ページをご確認ください。

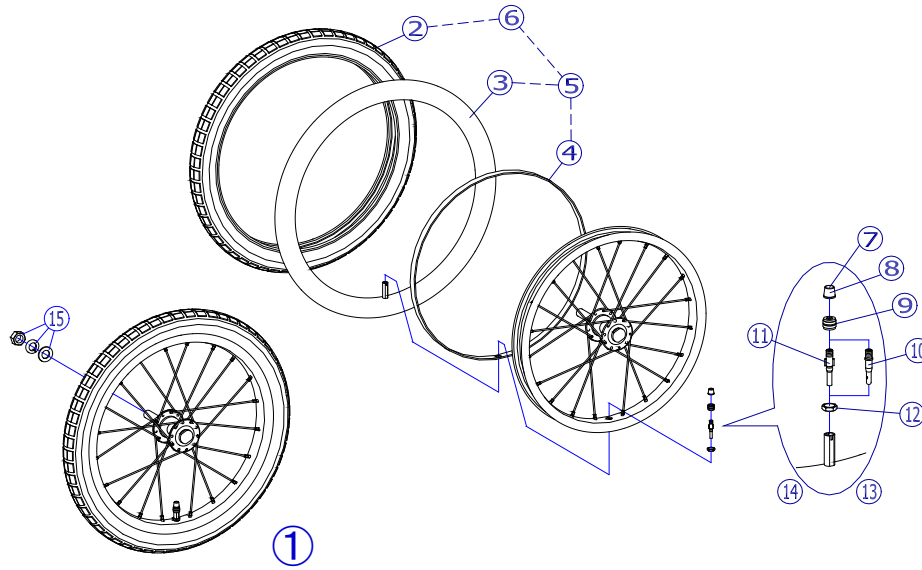

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

2019/12/16修正G

機種名/品名		12×1-3/8 車輪(スポークタイプ)				ページ	XTC- PD03B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考		
1	---	12×1-3/8 車輪(スポークタイプ)完成 ↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。	---	---	---	-	-	設定無	
2	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2				
3	X-PD03-003	12×1-3/8 チューブのみ	-	-	-			設定無	
4	X-PD03-004	12×1-3/8 フラップのみ	1	本	2				
5	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット ↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2			③、④のセット	
	X-PD03-095	12×1-3/8 チューブ+フラップセット 虫ゴム ↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。	1	本	2			③、④のセット	
6	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット ↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2			②、③、④のセット	
	X-PD03-096	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム ↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。	1	本	2			②、③、④のセット	
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2				
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2				
9	---	トップナット	-	-	-			セットでの販売となります	
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2			⑦キャップ(青)付	
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2			⑧キャップ(黒)付	
12	---	リムナット	-	-	-			セットでの販売となります	
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2			⑦、⑨、⑩、⑫のセット	
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2			⑧、⑨、⑪、⑫のセット	
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット ↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。	1	個	2				
注記									