


2019年12月頃～
 ドラムブレーキの仕様が
 変更となります。(互換性あり)
 タイプ【2B-A】【2B-B】⇒ タイプ【2N-B】
 タイプ【3A】⇒ タイプ【3N】へ統合

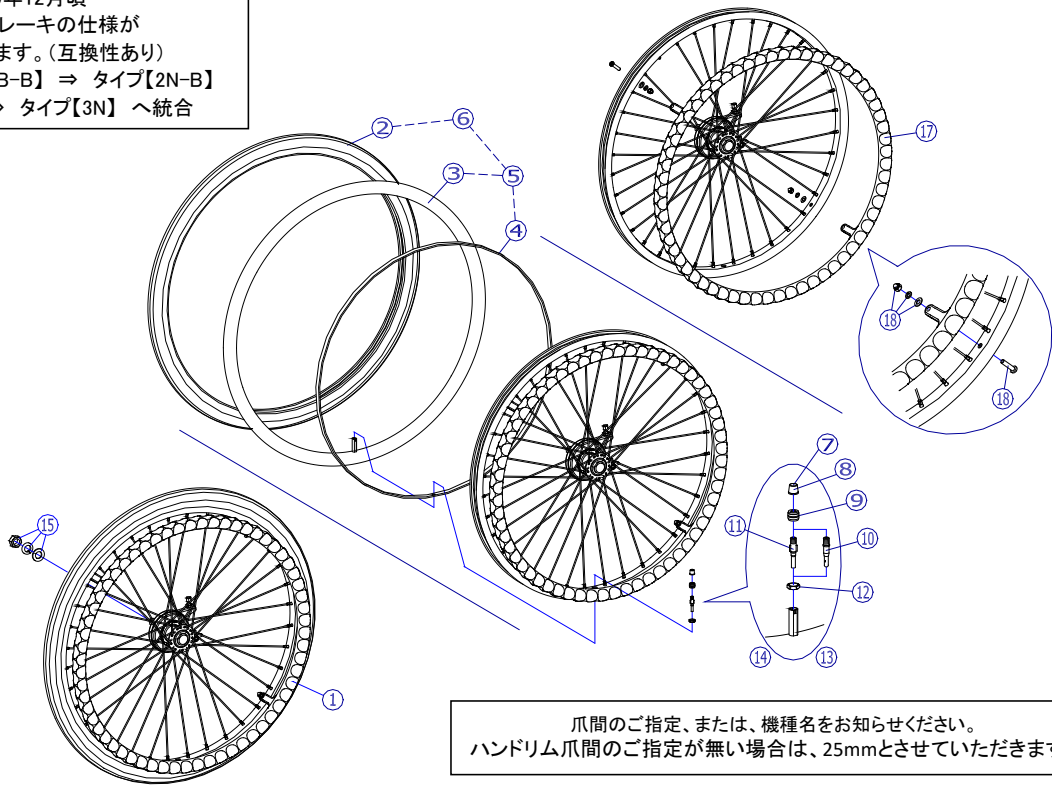

爪間のご指定、または、機種名をお知らせください。
 ハンドリム爪間のご指定が無い場合は、25mmとさせていただきます。

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

2019/11/15修正K

機種名／品名		20×1 車輪				ページ	XTC- PD09B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考		
1	X-PD09-001	20×1 車輪完成(爪間25mm)	1	本	2		ワイヤー無 ドラムハブ固定方法は 【PD01】をご参照下さい。		
	X-PD09-101	20×1 車輪完成(爪間20mm)	1	本	2				
			↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。						
	X-PD09-021L-2BA	20×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2B-A (左)	1	本	1				
	X-PD09-021R-2BA	20×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2B-A (右)	1	本	1				
	X-PD09-021L-2NB	20×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2N-B (左)	1	本	1				
	X-PD09-021R-2NB	20×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2N-B (右)	1	本	1				
	X-PD09-121L-2BA	20×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2B-A (左)	1	本	1				
	X-PD09-121R-2BA	20×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2B-A (右)	1	本	1				
X-PD09-121L-2NB	20×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2N-B (左)	1	本	1					
X-PD09-121R-2NB	20×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2N-B (右)	1	本	1					
		↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。ハンドリム爪間をご指定下さい。(指定が無い場合は25mmとさせていただきます)							
2	X-PD09-002	20×1 タイヤのみ	1	本	2				
3	---	20×1 チューブのみ	-	-	-		設定無		
4	X-PD10-004	20×1-3/8 フラップのみ	1	本	2				
		↑ 20×1と共通部品です。							
5	X-PD09-005	20×1 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、④のセット		
			↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。						
	X-PD09-095	20×1 チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		③、④のセット		
		↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。							
6	X-PD09-006	20×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、④のセット		
			↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。						
	X-PD09-096	20×1 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		②、③、④のセット		
		↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。							
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2				
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2				
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります		
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		⑦キャップ(青)付		
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		⑧キャップ(黒)付		
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります		
注記									

