


機種により仕様が異なります。機種名をご確認ください。
 MW-SLシリーズ、SAシリーズは【WA43】ページ、
 USLシリーズは【WB06】ページをご確認ください。

2019年12月頃～
 ドラムブレーキの
 仕様が変わると
 なります。
 (互換性あり)

【2B-A】、【2B-B】
 ⇒ 【2N-B】
 【3A】 ⇒ 【3N】
 へ統合

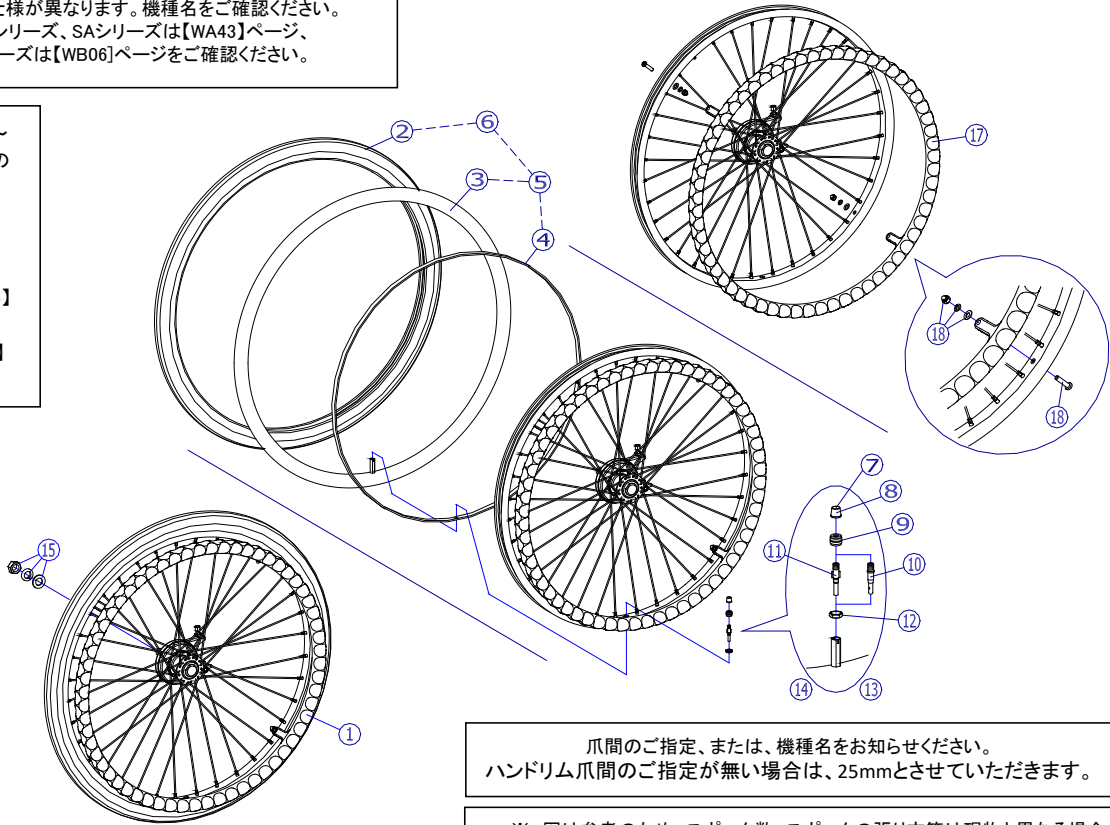

爪間のご指定、または、機種名をお知らせください。
 ハンドリム爪間のご指定が無い場合は、25mmとさせていただきます。

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

機種名／品名		22×1 車輪				ページ	XTC- PD11B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PD11-001	22×1 車輪完成(爪間:25mm)	1	本	2			
	X-PD11-101	22×1 車輪完成(爪間:20mm)	1	本	2			
		↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。						
	X-PD11-021L-2BA	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2B-A (左)	1	本	1			
	X-PD11-021R-2BA	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2B-A (右)	1	本	1			
	X-PD11-021L-2BB	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2B-B (左)	1	本	1			
	X-PD11-021R-2BB	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2B-B (右)	1	本	1			
	X-PD11-021L-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2N-B (左)	1	本	1			
	X-PD11-021R-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ2N-B (右)	1	本	1			
	X-PD11-121L-2BA	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2B-A (左)	1	本	1			
	X-PD11-121R-2BA	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2B-A (右)	1	本	1			
	X-PD11-121L-2BB	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2B-B (左)	1	本	1			
	X-PD11-121R-2BB	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2B-B (右)	1	本	1			
	X-PD11-121L-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2N-B (左)	1	本	1			
X-PD11-121R-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ2N-B (右)	1	本	1				
	↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。							
2	X-PD11-002	22×1 タイヤのみ	1	本	2			
3	X-PD11-003	X 22×1 チューブのみ	-	-	-		設定無	
4	X-PD12-004	22×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		22×1と共通部品です	
5	X-PD11-005	22×1 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、④のセット	
		↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。						
	X-PD11-095	22×1 チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		③、④のセット	
6		↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。						
	X-PD11-006	22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、④のセット	
	X-PD11-096	22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		②、③、④のセット	
	↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。							
注記	標準仕様は、鉄ハブ、22×1-3/8(36H)リム、ハンドリム爪間25mm となります。							

