


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
2	X-PF02-001	MWタイプ(LL) フットサポ-ト板	1 枚	2		左右共通
2	X-PF02-011	MWタイプ(L) フットサポ-ト板	1 枚	2		左右共通
2	X-PF02-012	MWタイプ(M) フットサポ-ト板	1 枚	2		左右共通
2	X-PF02-013	MWタイプ(S) フットサポ-ト板	1 枚	2		左右共通
2	X-PF02-014	MXタイプ(LL) フットサポ-ト板	1 枚	2		左右共通
2	X-PF02-015	MXタイプ(L) フットサポ-ト板	1 枚	2		左右共通
2	X-PF02-016	MXタイプ(M) フットサポ-ト板	1 枚	2		左右共通
3	X-PF02-003	MWタイプ フットサポ-ト用板ハネ	1 枚	2		MW, MX 共通
4	X-PF02-004	MWタイプ用 ハネハネ-キャップ	1 個	2		φ19 / MW, MX 共通
5	X-PF01-005	ハネハネ-キャップ 固定ネジ	1 個	2		
6	X-PF02-006	MWタイプ 三角ナット式φ15.9ネジ完成	1 本	2		MW, MX 共通
7	X-PF01-007	引上げネジ	1 本	2		
8	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1 個	2		
10	X-PF02-021L	MWタイプ(LL) φ15.9用フットサポ-ト完成(左)	1 個	1		
10	X-PF02-021R	MWタイプ(LL) φ15.9用フットサポ-ト完成(右)	1 個	1		
10	X-PF02-022L	MWタイプ(L) φ15.9用フットサポ-ト完成(左)	1 個	1		
10	X-PF02-022R	MWタイプ(L) φ15.9用フットサポ-ト完成(右)	1 個	1		
10	X-PF02-023L	MWタイプ(M) φ15.9用フットサポ-ト完成(左)	1 個	1		
10	X-PF02-023R	MWタイプ(M) φ15.9用フットサポ-ト完成(右)	1 個	1		
10	X-PF02-024L	MWタイプ(S) φ15.9用フットサポ-ト完成(左)	1 個	1		
10	X-PF02-024R	MWタイプ(S) φ15.9用フットサポ-ト完成(右)	1 個	1		
10	X-PF02-025L	MXタイプ(LL) φ15.9用フットサポ-ト完成(左)	1 個	1		
10	X-PF02-025R	MXタイプ(LL) φ15.9用フットサポ-ト完成(右)	1 個	1		
10	X-PF02-026L	MXタイプ(L) φ15.9用フットサポ-ト完成(左)	1 個	1		

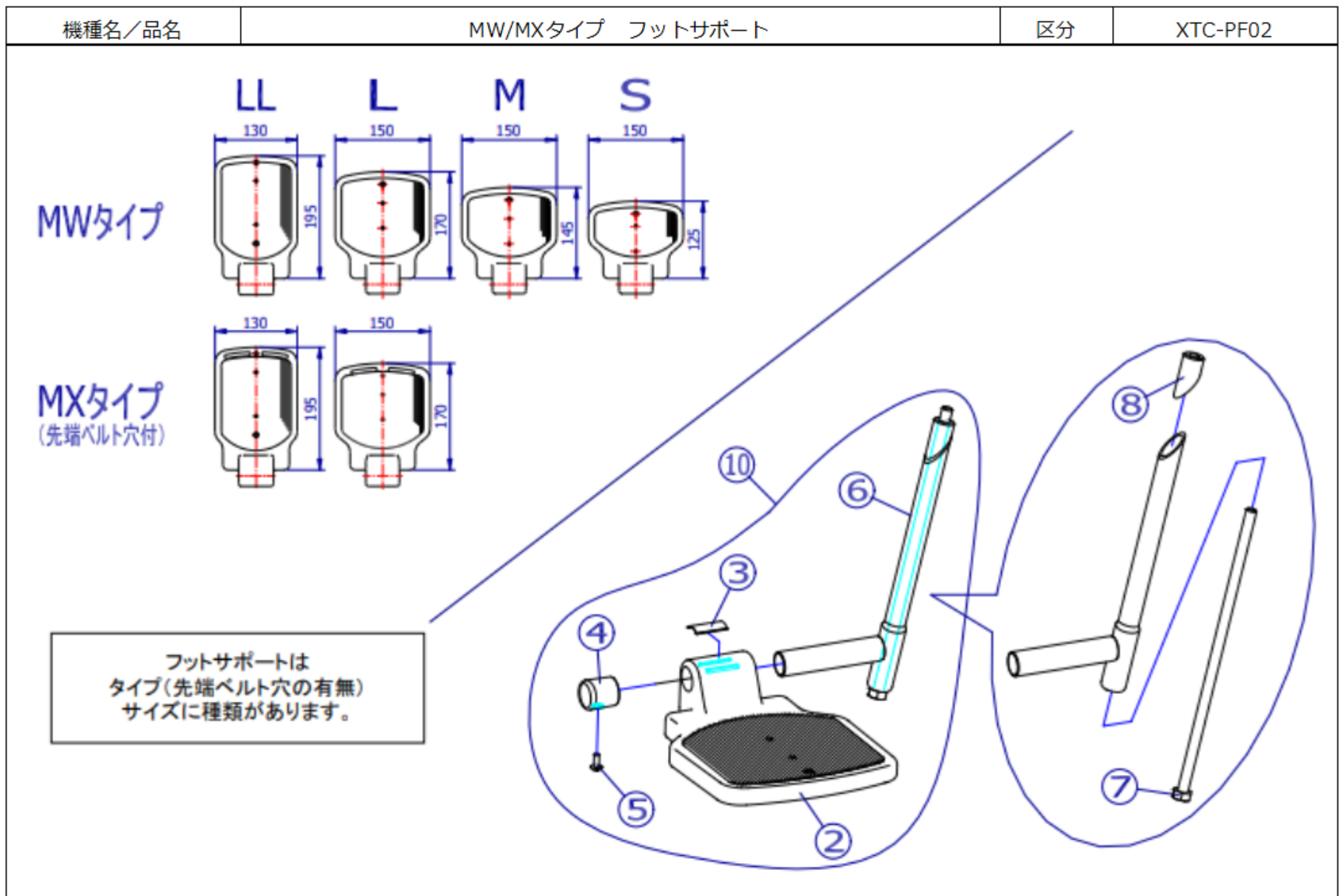

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
10	X-PF02-026R	MXタイプ (L) φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1		
10	X-PF02-027L	MXタイプ (M) φ15.9用フットサポート完成(左)	1 個	1		
10	X-PF02-027R	MXタイプ (M) φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1		