



機種名／品名	MAタイプ フットサポート (ボルト固定)	ページ	XTC- PF05A
--------	------------------------------	-----	------------

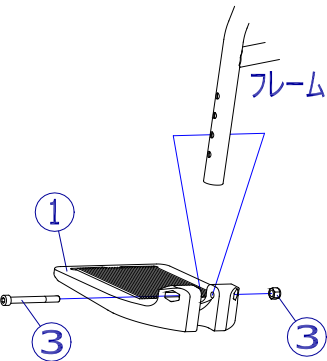

直接固定仕様

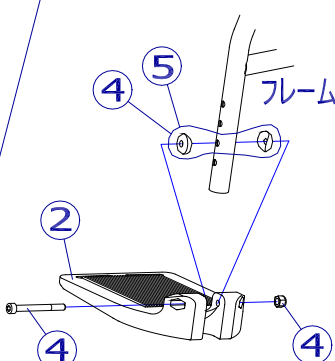


R付ワッシャー入
固定仕様

<代表機種 使用一覧>

機種	固定方法	穴	サイズ
・MW-SL1B,2B	直接固定	穴無	L
・MW-SL3B,4B,5B,6B	直接固定	穴有	M
・MW-SL11B,21B	R付ワッシャー入	穴無	L
・MW-SL31B,41B	R付ワッシャー入	穴有	M
・USL-1B,2B	R付ワッシャー入	穴有	L
・ECO-201B, 301	R付ワッシャー入	穴無	L


直接固定仕様

L

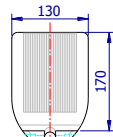


130
170

M

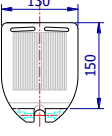

130
150

S

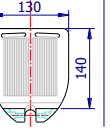


130
140

穴無タイプ


R付ワッシャー入
固定仕様

L

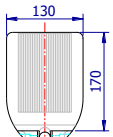

130
170

M

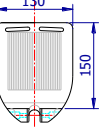

130
150

穴有タイプ
(先端ボルト穴付)

※ 機種により仕様異なります。
また、座幅によりサイズ異なります。

2018/9/19修正A

機種名／品名		MAタイプ フットサポート (ボルト固定)	ページ	XTC- PF05B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
		↓ サイズ、仕様にご注意ください。					
1	X-PF04-001	MAタイプフットサポート板 (Lサイズ穴有)	1	枚	2		左右共通、③ボルト付
	X-PF04-011	MAタイプフットサポート板 (Mサイズ穴有)	1	枚	2		左右共通、③ボルト付
	X-PF04-012	MAタイプフットサポート板 (Sサイズ穴有)	1	枚	2		左右共通、③ボルト付
	X-PF05-013	MAタイプフットサポート板 (Lサイズ穴無)	1	枚	2		左右共通、③ボルト付
2	X-PF05-014	MAタイプフットサポート板 (Lサイズ穴無 R付ワッシャー仕様)	1	枚	2		左右共通、④ボルト付
	X-PF05-015	MAタイプフットサポート板 (Mサイズ穴有 R付ワッシャー仕様)	1	枚	2		左右共通、④ボルト付
	X-PF05-016	MAタイプフットサポート板 (Lサイズ穴有 R付ワッシャー仕様)	1	枚	2		左右共通、④ボルト付
3	X-PF04-003	MAタイプフットサポート用ボルトセット	1	本	2		
4	X-PF05-004	MAタイプフットサポート用 R付ワッシャーボルトセット	1	本	2		
5	X-PF05-005	MAタイプフットサポート用R付ワッシャー(2個セット)	1	個	2		
注記							