


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
2	X-PF08-002L	AWタイプフットサポート(LLサイズ)(左)	1枚	1		
2	X-PF08-002R	AWタイプフットサポート(LLサイズ)(右)	1枚	1		
2	X-PF08-012L	AWタイプフットサポート(Lサイズ)(左)	1枚	1		
2	X-PF08-012R	AWタイプフットサポート(Lサイズ)(右)	1枚	1		
2	X-PF08-013L	AWタイプフットサポート(Mサイズ)(左)	1枚	1		
2	X-PF08-013R	AWタイプフットサポート(Mサイズ)(右)	1枚	1		
2	X-PF08-014L	AWタイプフットサポート(Sサイズ)(左)	1枚	1		
2	X-PF08-014R	AWタイプフットサポート(Sサイズ)(右)	1枚	1		
3	X-PF02-003	MWタイプフットサポート用板ハネ	1枚	2		AWとMWは共通です。
4	X-PF02-004	MWタイプ用バックルキャップ	1個	2		AWとMWは共通です。
5	X-PF01-005	バックルキャップ固定ネジ	1個	2		
6	X-PF02-006	MWタイプ 三角ナット式φ15.9mm完成	1本	2		※特注品
7	X-PF01-007	引上げボルト	1本	2		
8	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1個	2		
9	X-PF06-008	FBタイプフットサポート板(LLサイズ)	1枚	2		左右共通
9	X-PF06-015	FBタイプフットサポート板(Lサイズ)	1枚	2		左右共通
9	X-PF06-016	FBタイプフットサポート板(Mサイズ)	1枚	2		左右共通
9	X-PF06-017	FBタイプフットサポート板(Sサイズ)	1枚	2		左右共通
10	X-PF08-009	AWタイプフットサポート基部	1個	2		左右共通
11	X-PF06-010	FBタイプフットサポート前後調整ボルト(4本セット)	1個	2		4本セット
12	X-PF08-021L	AWタイプ(LLサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1個	1		
12	X-PF08-021R	AWタイプ(LLサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1個	1		
12	X-PF08-022L	AWタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1個	1		
12	X-PF08-022R	AWタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1個	1		

機種名/品名



AWタイプ フットサポート

区分



XTC-PF08

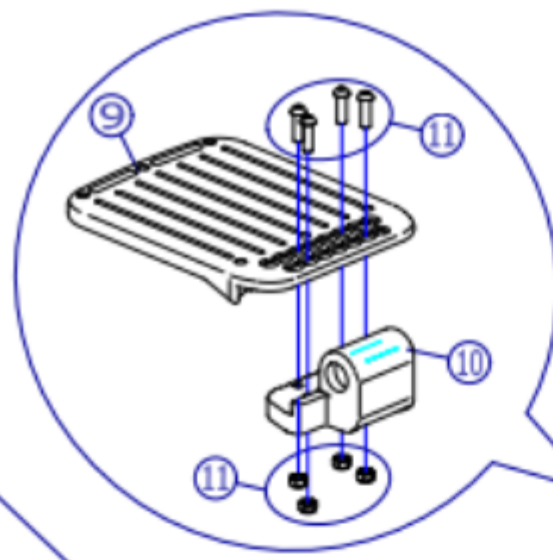

⑥ は標準がメッキです  
 ※ OH-1の場合 黒塗装  
 2020年2月頃～  
 黒 ⇒ シルバーに変更

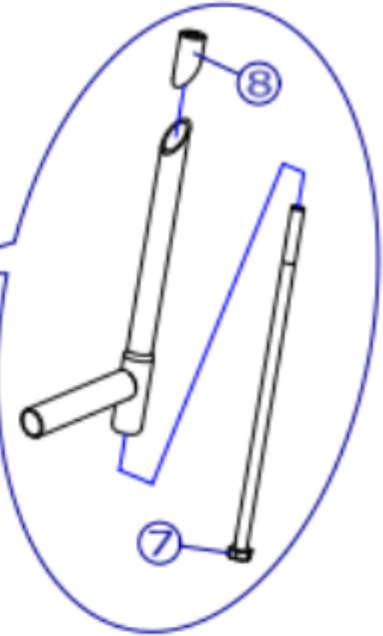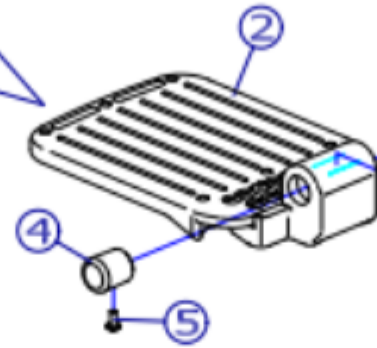

※ 機種により仕様が異なります。  
 また、座幅によりサイズが異なります。  
 前後取付位置も機種により異なります。  
 (OH-1用はWL04ページを参照ください)

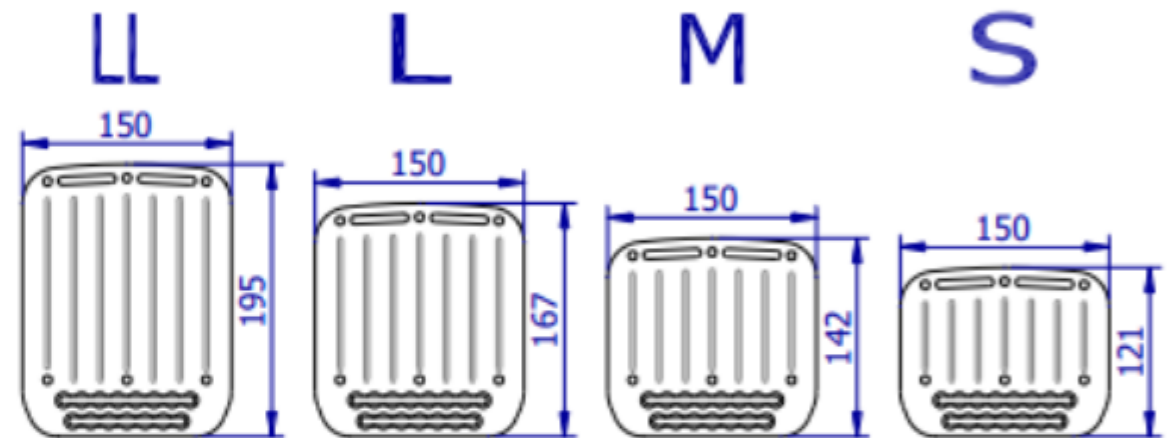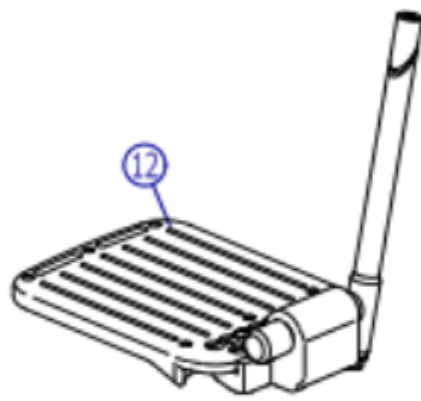

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
12	X-PF08-023L	AWタイプ (Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1 個	1		
12	X-PF08-023R	AWタイプ (Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1		
12	X-PF08-024L	AWタイプ (Sサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1 個	1		
12	X-PF08-024R	AWタイプ (Sサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1		