


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
-	X-PX03-014	前方かゝり架セット(鉄一本物)	1 セット	-		①、③のセット
-	X-PX03-051	前方かゝり架(φ25用)セット(鉄一本物)	1 セット	-		①、③(φ25用)のセット/φ25mm用
-	X-PX03-024	前方かゝり架セット(アルミ伸縮)	1 セット	-		②、③のセット
-	X-PX03-052	前方かゝり架(φ25用)セット(アルミ伸縮)	1 セット	-		②、③(φ25用)のセット/φ25mm
-	X-PX03-016	エレベーター用 前方かゝり架セット(鉄一本物)	1 セット	-		①、⑩のセット
-	X-PX03-026	エレベーター用 前方かゝり架セット(アルミ伸縮)	1 セット	-		②、⑩のセット
-	X-PX03-015	後方かゝり架セット(鉄一本物)	1 セット	-		①、⑥のセット
-	X-PX03-025	後方かゝり架セット(アルミ伸縮)	1 セット	-		②、⑥のセット
1	X-PX03-001	鉄一本物かゝり棒	1 本	-		⑩付
2	X-PX03-002	アルミ伸縮式かゝり棒	1 本	-		⑩付
3	X-PX03-003	前方かゝり架受金具	1 個	-		④、⑤、⑪が含まれます。
3	X-PX03-053	前方かゝり架受金具(φ25用)	1 個	-		④、⑪が含まれます
3	X-PX03-063	エレベーター用 前方かゝり架受金具(φ25用)	1 個	-		④、⑤、⑪が含まれます
4	X-PA03-022	M8×15 ノット	1 個	-		
5	X-PX03-005	パイプ径調整フック(円筒)	1 個	-		ピンシート付
6	X-PX03-007	後方かゝり架受金具	1 個	-		⑦、⑧、⑨、⑫が含まれます。
7	X-PA03-023	M8×20 ノット	1 個	-		
8	X-PX03-008	M8 ノット用ワッシャー	1 本	-		
9	X-PX03-009	後方かゝり架上部受金具	1 個	-		
10	X-PX03-010	エレベーター用 前方かゝり架受金具	1 個	-		
11	X-PA90-014	対辺 4mm サベース六角レンチ	1 本	-		
12	X-PA90-015	対辺 5mm サベース六角レンチ	1 本	-		
13	X-PX03-013	ガートル架 取扱説明書	1 冊	-		
14	X-PX05-006	パイプ径調整フック(ジョイント)	1 個	-		

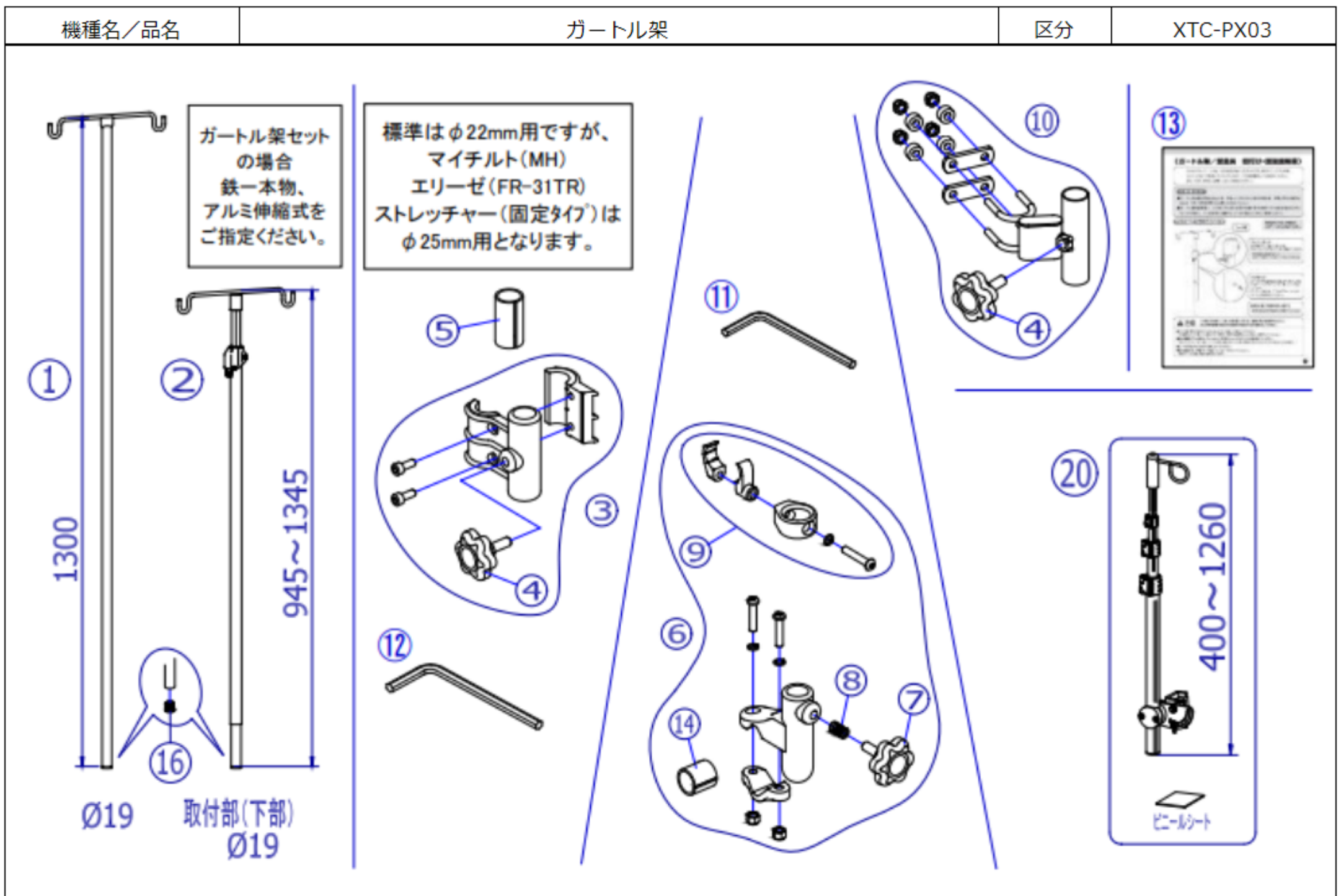

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
16	X-PA01-101	6分用中柱	1 個	1		黒
20	EP07	ビニール	1 本	-		ビニールシート、専用取扱説明書付