


機種名/品名	松葉杖 CMS-80	ページ	XTC- YH23A
--------	------------	-----	------------

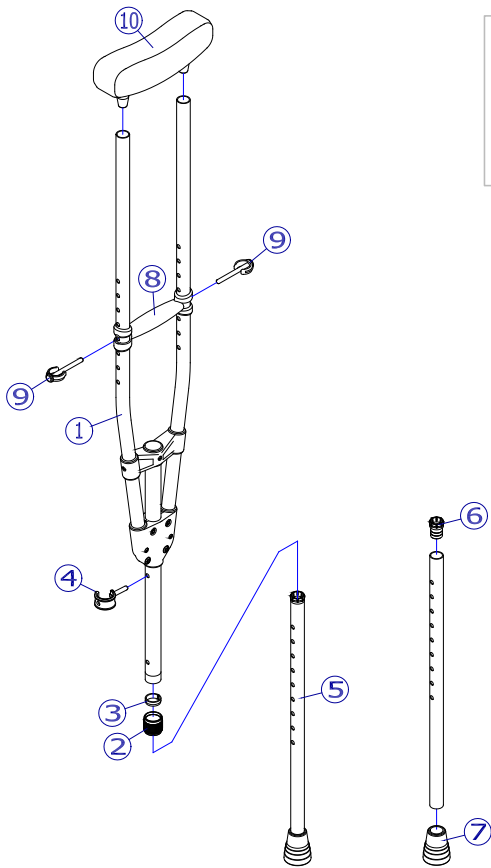

色違い(シルバー/黒)
があります。
※茶は2017年12月より販売終了となりました。

ロットにより多少色の違いが
ありますが、ご了承ください。

サイズにより部品が
異なる物があります。



2019/12/17修正B

機種名/品名		松葉杖 CMS-80	ページ	XTC- YH23B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数 見積価格 標準納期 備考		
1	---	松葉杖 L 本体	---	---	設定無	
	---	松葉杖 M 本体	---	---	設定無	
	---	松葉杖 S 本体	---	---	設定無	
2	X-YH20-027	杖締付キャップ(φ22用) シルバー	1	個	1	
	X-YH20-029	杖締付キャップ(φ22用) 黒	1	個	1	
	X-YH20-030	X 杖締付キャップ(φ22用) 茶	1	個	1	販売終了
3	X-YH20-026	杖締付C形リング(φ22用)	1	個	1	
4	X-PA03-001	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】(黒)	1	個	1	
5	---	松葉杖用 伸縮パイプ L	---	---	---	設定無
	---	松葉杖用 伸縮パイプ M	---	---	---	設定無
	---	松葉杖用 伸縮パイプ S	---	---	---	設定無
6	X-YH20-028	ガタ防止インナーキャップ(φ19用)	1	個	1	
7	X-YH20-003	杖先ゴム(φ19用)【D】	1	個	1	黒色、カタログ【D】
8	X-YH23-088	松葉杖用 グリップ	1	個	1	
9	X-YH23-089	松葉杖用 グリップ固定ピン	1	個	2	
10	X-YH23-080	松葉杖用 脇パッド	1	個	1	
11	X-YH23-087	松葉杖 取扱説明書	1	冊	1	
注記						