


機種名/品名	シャワーキャリー/トイレキャリー(SWデラックス) アームサポート部	ページ	XTC- YH48A
--------	------------------------------------	-----	------------

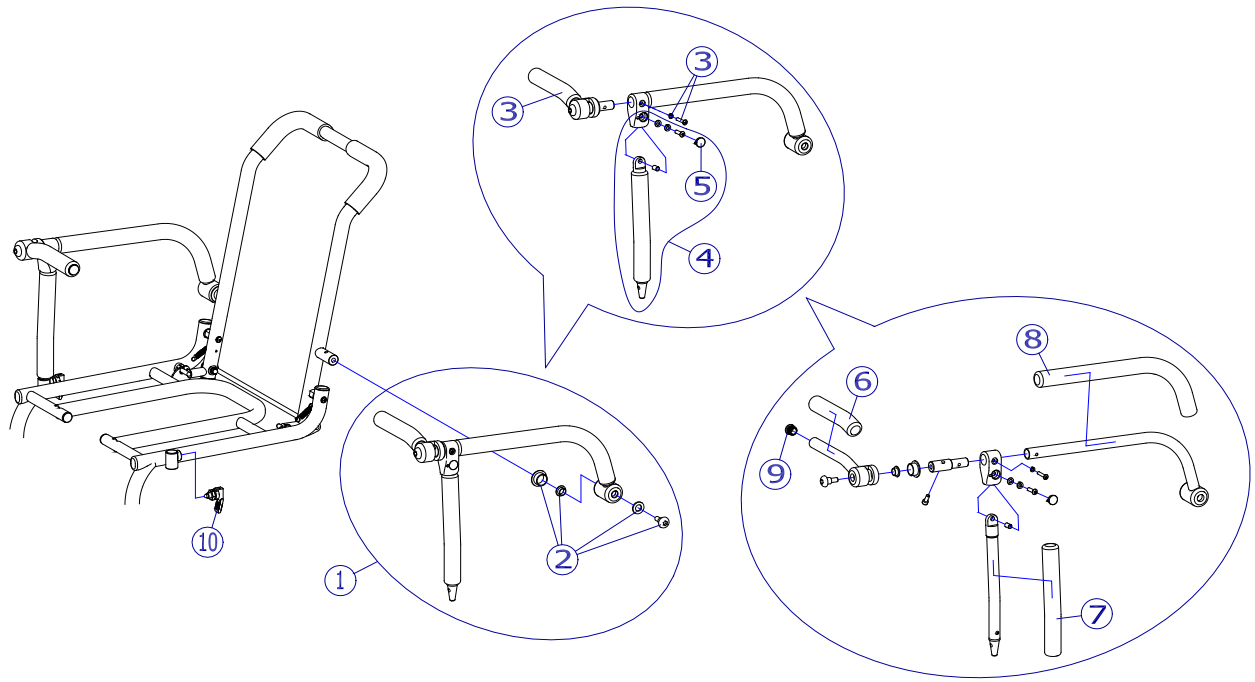

機種名/品名	シャワーキャリー/トイレキャリー(SWデラックス) アームサポート部	ページ	XTC- YH48B
--------	------------------------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-YH48-131L X-YH48-131R	SW デラックス用 アームサポート(左) SW デラックス用 アームサポート(右)	1 本 1 本	1 1			
2	X-YH47-122	SW用 アームサポート 跳ね上げ支点ボルトセット	1 本	2			
3	X-YH48-133L X-YH48-133R	SW用 アームサポート フロントグリップセット(左) SW用 アームサポート フロントグリップセット(右)	1 本 1 本	1 1			
4	X-YH47-124L X-YH47-124R	SW用 アームサポート 前方パイプセット(左) SW用 アームサポート 前方パイプセット(右)	1 本 1 本	1 1			
5	X-YH53-193	浴槽用穴埋めキャップ	1 個	4			
6	X-YH48-136	SW用 アームサポート フロントグリップ保護チューブ	1 本	2			
7	X-YH47-126	SW用 アームサポート 前方保護チューブ	1 本	2			
8	X-YH47-127	SW用 アームサポート 保護チューブ	1 本	2			
9	X-YH48-139	SW用 アームサポート フロントグリップ中栓	1 個	2			
10	X-YH47-128	SW用 セーフティーロック	1 個	2			

注記							
----	--	--	--	--	--	--	--