


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
-	X-PD15-052	16×1-3/8 ハイブリッドタイヤのみ	1本	2		
-	X-PD15-042	16×1-3/8 ハイブリッドタイヤ(中身)のみ	1本	2		
-	X-PD15-007	16×1-3/8 ハイブリッドタイヤ(中身)+タイヤ	1本	2		
-	X-WC35-010	NEXTフレーム製作 NX05	1本	2		
-	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスター	1個	2		キャスター取付位置は(c)
-	X-WC09-019-46F01	NEXT用 立体クッション加圧シート(背付) 460幅 F-1	1個	1		⑤、⑥、⑦のセット
-	X-WC09-019-46F02	NEXT用 立体クッション加圧シート(背付) 460幅 F-2	1個	1		⑤、⑥、⑦のセット
-	X-WC09-019-46F03	NEXT用 立体クッション加圧シート(背付) 460幅 F-3	1個	1		⑤、⑥、⑦のセット
-	X-WC09-019-46F04	NEXT用 立体クッション加圧シート(背付) 460幅 F-4	1個	1		⑤、⑥、⑦のセット
1	---	本体フレーム	---	---		
2	X-WC13-001L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アーム(左)	1個	1		
2	X-WC13-001R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アーム(右)	1個	1		
3	X-WC09-003L	NEXT-52/62用 シングアーム(左)	1個	1		⑧レッグパッド付
3	X-WC09-003R	NEXT-52/62用 シングアーム(右)	1個	1		⑧レッグパッド付
4	X-WC37-006	NEXT用 6インチPUキャスター	1個	2		キャスター取付位置は(c)
5	X-WC37-002	キャスターキャップ【N】	1個	2		
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニクッション(左)	1個	1		パッド付
6	X-WC38-001R	NEXT用 ミニクッション(右)	1個	1		パッド付
7	X-WC38-005L	NEXT用 ミニクッション調整プレート(ブラック)(左)	1個	1		パッド付プレート黒色
7	X-WC38-005R	NEXT用 ミニクッション調整プレート(ブラック)(右)	1個	1		パッド付プレート黒色
8	X-WC32-001L-HB	NEXT用 16×1-3/8軽量車輪(左) ハイブリッド	1本	1		タイヤ無
8	X-WC32-001R-HB	NEXT用 16×1-3/8軽量車輪(右) ハイブリッド	1本	1		タイヤ無
8	X-WC10-008L	NEXT用 16×1-3/8軽量車輪(左) 専用NX05付	1本	1		
8	X-WC10-008R	NEXT用 16×1-3/8軽量車輪(右) 専用NX05付	1本	1		

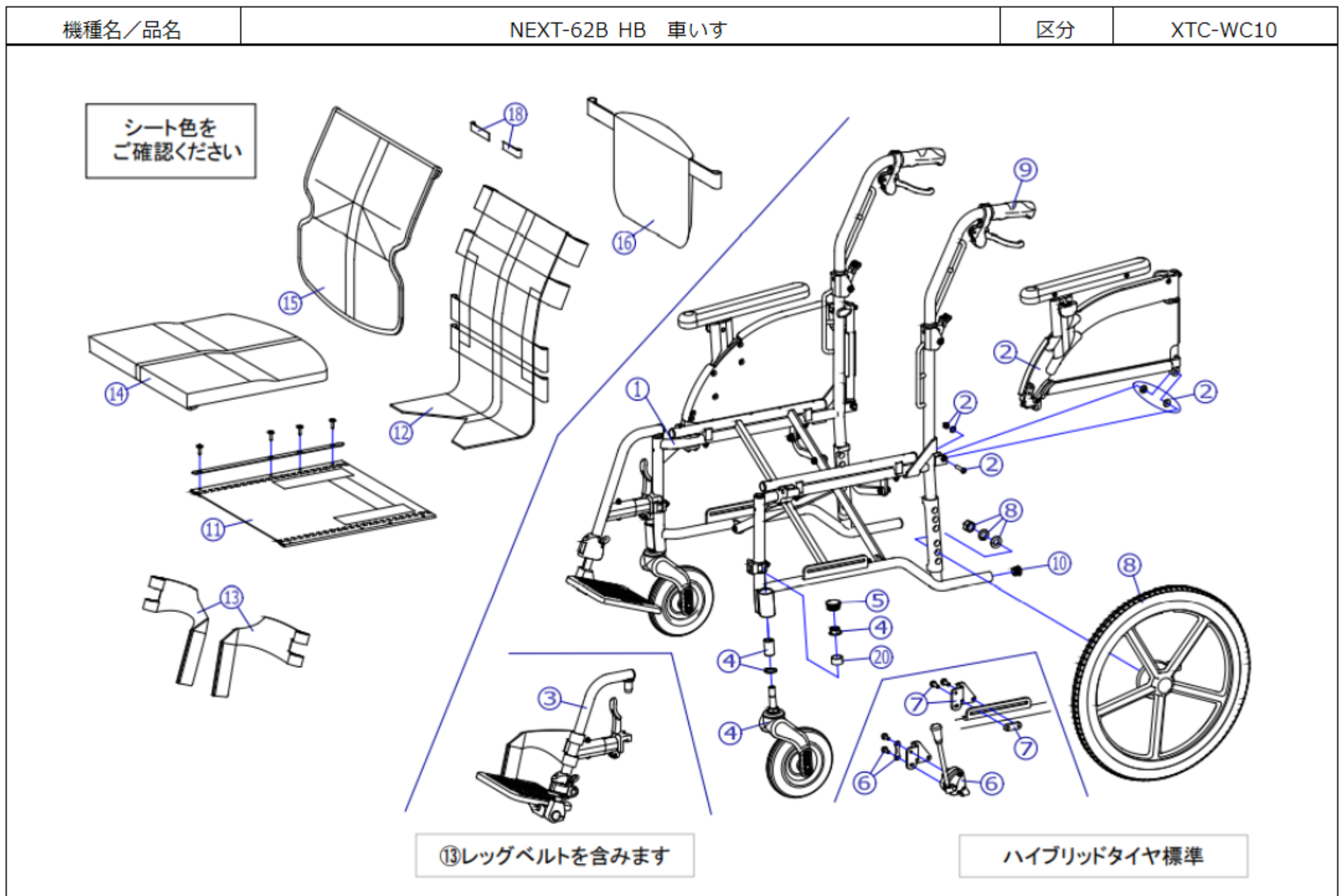

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
9	X-PA01-007	NEXTグリップ	1本	2		接着剤必要
10	X-PA01-101	6分用中柱	1個	2		
11	X-WC09-011-46000	NEXTワイド用 座パッドシート(芯金・シート付) 460幅	1枚	1		
12	X-WC09-012-00000	NEXTワイド用 背張り調整シート	1枚	1		
13	X-WC03-012L	NEXTワイド用 レッグベルト(左)	1本	1		
13	X-WC03-012R	NEXTワイド用 レッグベルト(右)	1本	1		
14	X-WC09-014-46F01	NEXTワイド用 座立体クッション 460幅 F-1	1枚	1		
14	X-WC09-014-46F02	NEXTワイド用 座立体クッション 460幅 F-2	1枚	1		
14	X-WC09-014-46F03	NEXTワイド用 座立体クッション 460幅 F-3	1枚	1		
14	X-WC09-014-46F04	NEXTワイド用 座立体クッション 460幅 F-4	1枚	1		
15	X-WC09-015-46F01	NEXTワイド用 背加圧シート 460幅 F-1	1枚	1		
15	X-WC09-015-46F02	NEXTワイド用 背加圧シート 460幅 F-2	1枚	1		
15	X-WC09-015-46F03	NEXTワイド用 背加圧シート 460幅 F-3	1枚	1		
15	X-WC09-015-46F04	NEXTワイド用 背加圧シート 460幅 F-4	1枚	1		
16	X-WC09-016	NEXTワイド用 後付ポケット	1枚	1		
18	X-WC01-018	NEXT用 クイックリリース(2個セット)	1個	1		2個セット
20	X-WC37-014	NEXT用 キャスターロック	1個	2		