


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WG05-001L	MH-GR用スイングアウト完成(左)	1 個	1		
1	X-WG05-001R	MH-GR用スイングアウト完成(右)	1 個	1		
2	X-WG05-002L	GRフットサポーター完成(左)	1 枚	1		
2	X-WG05-002R	GRフットサポーター完成(右)	1 枚	1		
3	X-WH66-003L	SRフットサポーター用 レッグパッド(左)	1 本	1		
3	X-WH66-003R	SRフットサポーター用 レッグパッド(右)	1 本	1		
4	X-WG05-004L	スイングアウトフット・レッグサポーター【G】(左)	1 個	1		
4	X-WG05-004R	スイングアウトフット・レッグサポーター【G】(右)	1 個	1		
5	X-PG01-015L	樹脂一体型スイングアウトユニット【樹脂A】(左)	1 個	1		⑤ネジセット(2本)付属
5	X-PG01-015R	樹脂一体型スイングアウトユニット【樹脂A】(右)	1 個	1		⑤ネジセット(2本)付属
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ネジセット	1 本	4		ネジ1本、ナット1個
7	X-WG05-007	樹脂スイングアウト用 フット・レッグサポーター用【G】	1 本	2		
8	X-WC21-001L	NEXTフットサポーター固定部品セット(左)	1 個	1		
8	X-WC21-001R	NEXTフットサポーター固定部品セット(右)	1 個	1		
9	X-WC21-016	NEXTカムクラック 押さえカバー	1 個	2		
10	X-WC21-010	NEXTクランクバネ-ロッキング	1 枚	2		左右共通
11	X-WC22-001	NEXTアシスタントフットサポーターセット	1 本	2		左右共通、⑥付
12	X-WC22-004	NEXTアシスタントフットサポーター下部固定ネジセット	1 本	2		
13	X-WH66-013L	SRフットサポーター基部(左)	1 個	1		
13	X-WH66-013R	SRフットサポーター基部(右)	1 個	1		
14	X-WH66-014L	SRフットサポーター板(左)	1 個	1		⑥固定部品セット付
14	X-WH66-014R	SRフットサポーター板(右)	1 個	1		⑥固定部品セット付
15	X-WH66-015	SRフットサポーター板固定部品セット	1 本	2		ネジ4本、金具付
16	X-WH66-016	SRフットサポーター保護ローラーセット	1 本	2		ネジ、カバー付

機種名/品名

マイチルトグラン MH-GR フット・レッグサポート部

区分

XTC-WG05

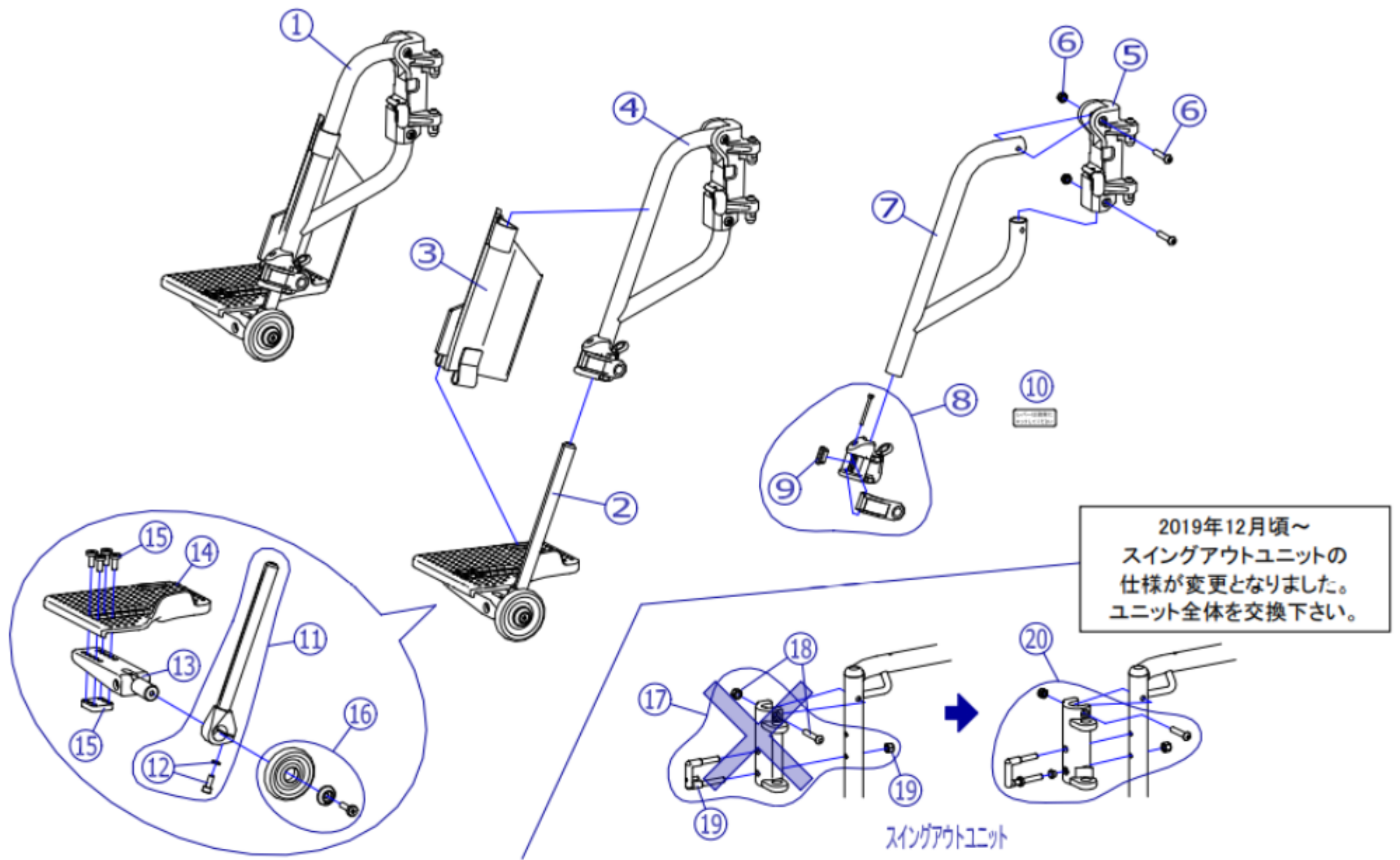

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
20	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1個	1		固定ボルト、Jの字金具付
20	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1個	1		固定ボルト、Jの字金具付