

MHシリーズ専用ボンベ架取扱説明書

この度はボンベ架をお買い上げいただき、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。また、大切に保管し必要に応じてお読みください。

取付け可能な車椅子


- ・MH-CR,SR用・・・MH-CR3D、MH-SR、MH-SR-SE、MH-SRL、MH-SRL-SE
- ・MH-RD,GR用・・・MH-RD3D、MH-GR、MH-GR-SE

注) MH-GRL, MH-GRL-SE には取付け出来ません。

構成部品


<MH-CR,SR用>

部品	個数
①本体	1
②取付け金具	1
③ベルト	1
④傷防止シール	2
⑤取付け用ボルトセット	1
⑥サービススパナ (8-10mm)	1
⑦六角レンチ (4mm)	1
⑧六角レンチ (5mm)	1
⑨取扱説明書	1

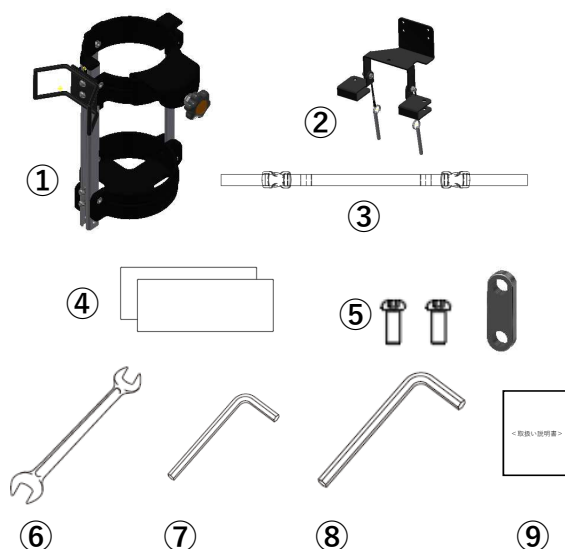

<MH-RD,GR用>

部品	個数
①本体	1
②ベルト	1
③傷防止シール	4
④サービススパナ (8-10mm)	1
⑤六角レンチ (4mm)	1
⑥六角レンチ (5mm)	1
⑦取扱説明書	1

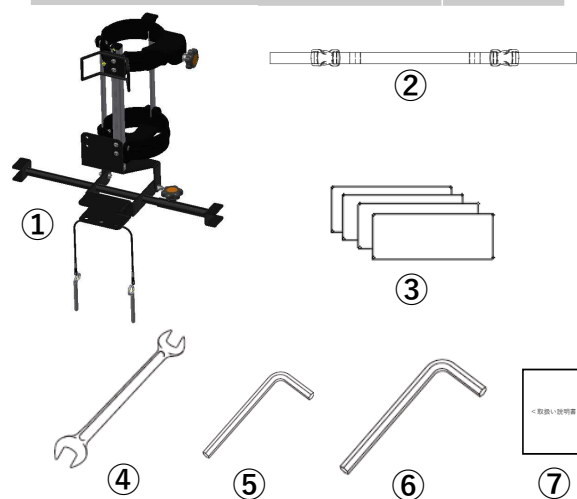

取付け前に

取付けは平坦で安全な場所で行ってください。
必ずブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。

使用する工具


同梱されている工具をご使用ください。

リクライニング用ポンベ架取付け方法 <MH-CR,SR用>


①取付け金具とポンベ架本体を組み立てます。

※機種によって取付け位置が違います。

※付属品のボルトで取付けてください。

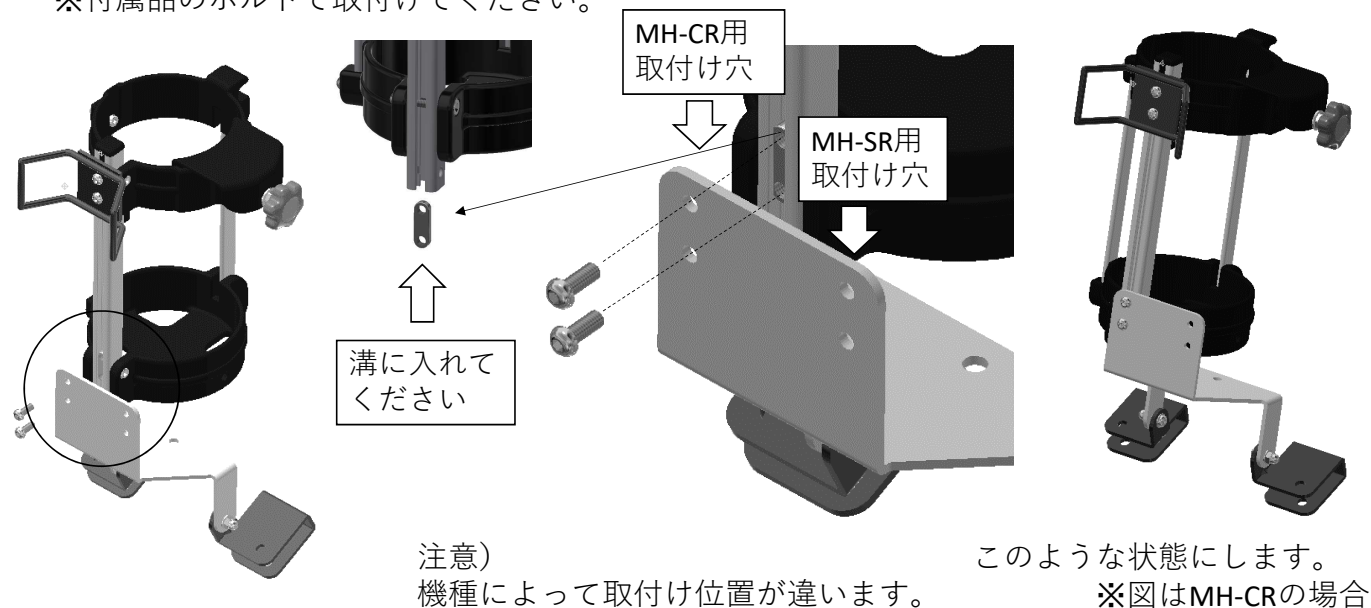



②車椅子側に傷防止テープを貼り付けてください。

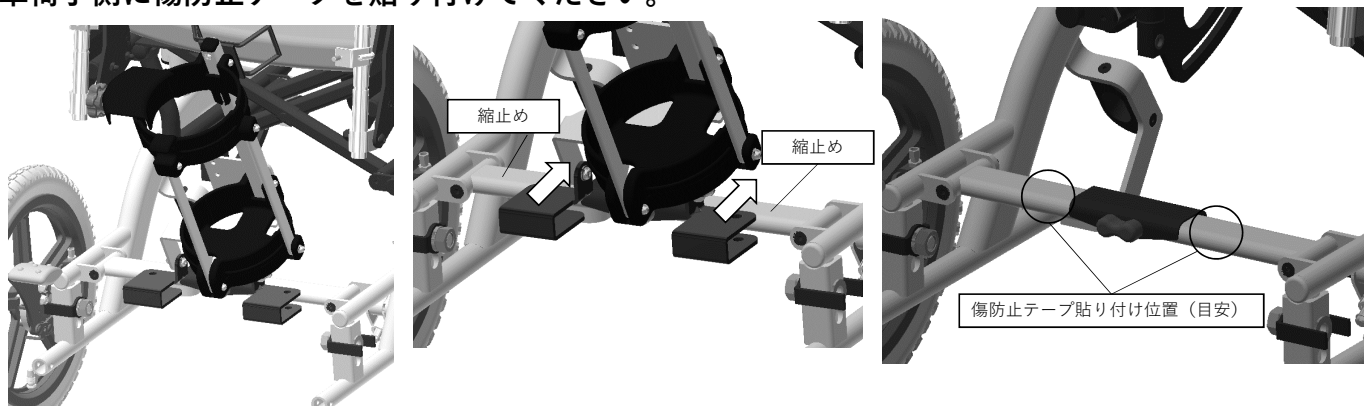

車椅子側の縮止めにポンベ架の取付け金具を図のように合わせ、その位置に傷防止テープをパイプ側に貼り付けて下さい。

③車椅子に取付けます。

傷防止テープを貼り付けたら、ポンベ架本体を車椅子に取付けてください。

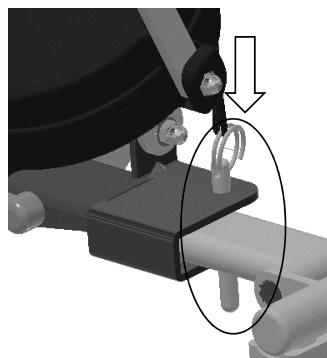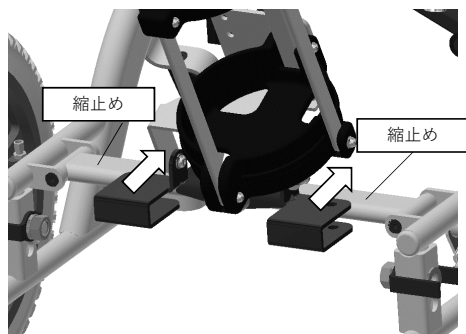

注意)
ピンはしっかりと奥まで差し込んでください。

※ピンは製品にヒモでつながっています。

ポンベ架の取付け金具を、縮止めに挟むようにしっかり奥まで差し込みます。


コの字金具の穴にピンを差し込みます。ピンは左右2か所両方に差し込んでください。

④ベルトの取付け。

ベルトで、車椅子の背もたれパイプにボンベ架を吊るします。

ボンベ架本体にベルトを通し、左右の背もたれに巻き付けて、バックルで固定します。バックルは「パチン」と音が鳴るまでしっかり入れてください。

(バックルは左右にあります。)

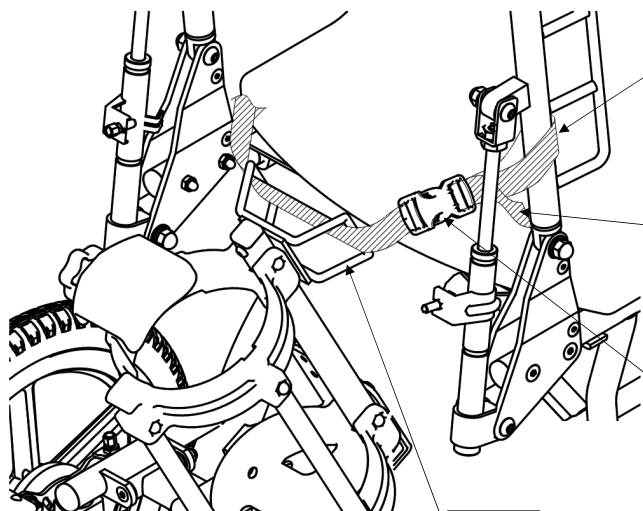

背もたれパイプに
巻き付きつけてください。



ベルトの長さを調整できます。
※ティルト、リクライニングは
起こした状態で調整してください。
※たるませる・・・ボンベ架が傾きます。
張る・・・ボンベ架が起き上がります。

「パチン」と
音がするまでしっかり
入れてください。

ここの“輪”にベルトを通してください。

リクライニング用ボンベ架取付け方法 <MH-RD,GR用>

①車椅子側に傷防止テープを貼り付けてください。

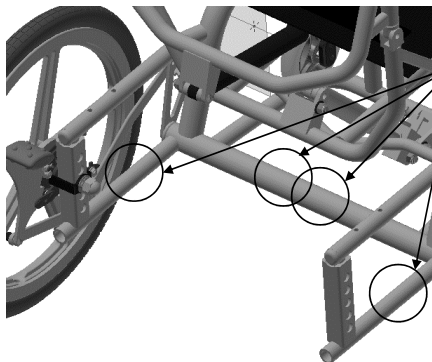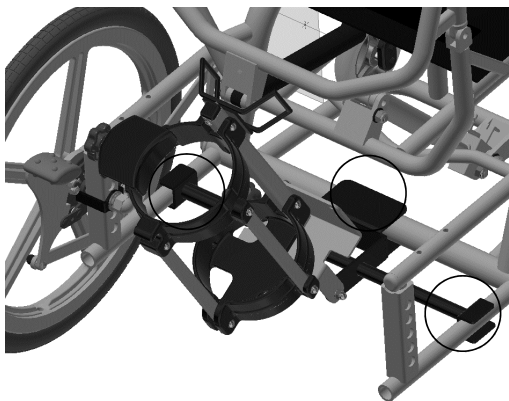


傷防止テープ貼り付け位置

フレームにボンベ架の取付け金具を図のように合わせ、その位置に傷防止テープをパイプ側に貼り付けて下さい。

②車椅子に取付けます。

傷防止テープを貼り付けたら、ボンベ架本体を車椅子に取付けてください。

取付けバーは伸縮可能です。
ノブねじを緩め、座幅に応じて
長さの調整をしてください。


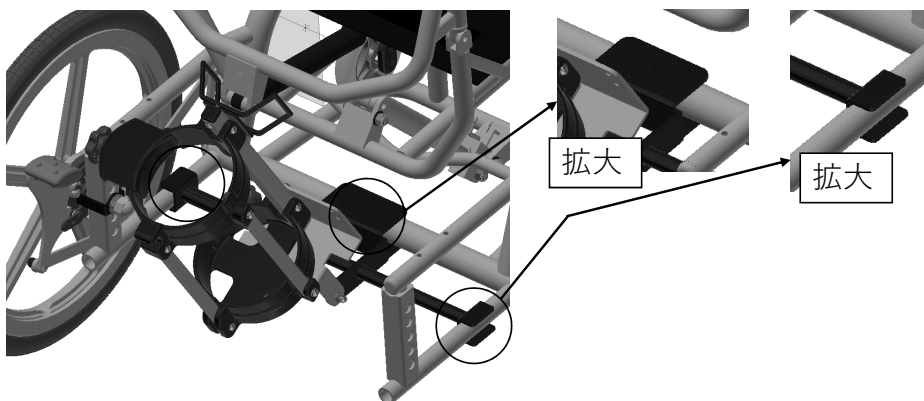


拡大

拡大

ボンベ架本体を図のようにパイプに挟むように
しっかり奥まで差し込みます。

③ピンを差し、車椅子と固定します。

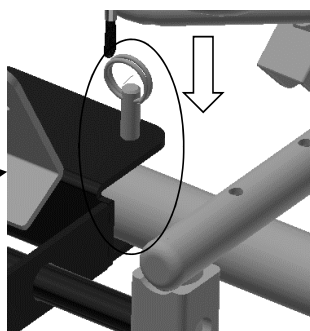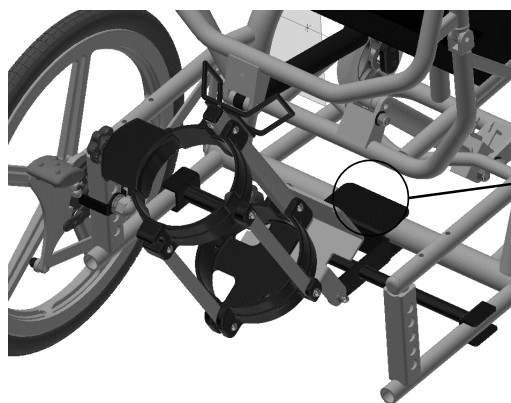

注意)
ピンはしっかりと奥まで差し込んでください。

※ピンは製品にヒモでつながっています。


コの字の金具の穴にピンを差し込みます。
ピンは左右2か所両側に差し込んでください。

④ベルトの取付け。

ベルトで、車椅子の背もたれにボンベ架を吊るします。

ボンベ架本体にベルトを通し、左右の背もたれに巻き付けて、バックルで固定します。
バックルは「パチン」と音が鳴るまでしっかり入れてください。

(バックルは左右にあります。)

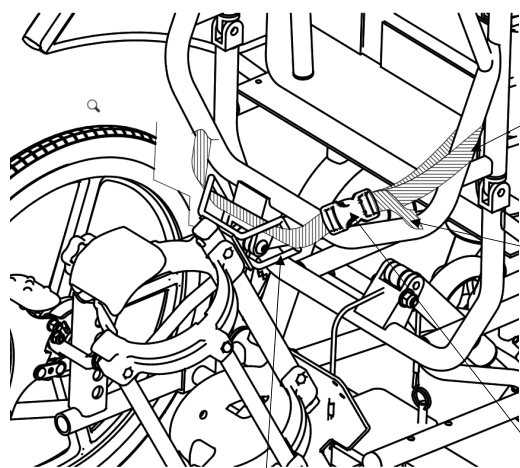

背もたれパイプに
巻き付きつけてください。

ベルトの長さを調整できます。
※ティルト、リクライニングは
起こした状態で調整してください。
※たるませる・・・ボンベ架が傾きます。
張る・・・ボンベ架が起き上がります。

この「輪」にベルトを通してください。

「パチン」と音がするまでしっかり
入れてください。

⚠ 注意

- ボンベ架には10kg以上の物は搭載しないでください。
- ボンベ以外の物は搭載しないでください
- 本製品は指定された車椅子以外には取付けないでください。
- MH-SRL、MH-SRL-SE（リフトアップ付き）に本製品を取り付けた場合、本製品とリフトアップレバーが近接いたします。リフトアップをする際には、レバーをしっかり視認したうえで操作をしてください。
- MH-CR,SRシリーズは本製品を取り付けると折り畳みが出来なくなります。ご注意ください。

- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。