

<スマートフォンケース・取扱説明書>


このたびは、スマートフォンケースをお買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく、安全にご使用していただく為に、この説明書をよくお読みください。

また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

構成部品

- ① スマートフォンケース：1 個
- ② 面ファスナー（60×20mm）：2 枚
- ③ 取扱説明書：1 冊（この紙）

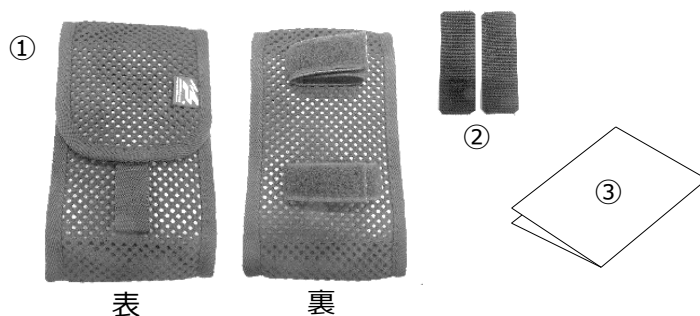

取付け可能な車椅子

レッグパイプ部に取付けスペースが確保出来ること。

取付ける場所に、他の付属品がある場合は取付ける事が出来ない場合があります。

カバーの取付け方法


- ① レッグパイプ部に
メスマジック（左側）を
巻き、その上に
裏側オスマジック
（右側）を巻き付ける。



- ② もう片側も
同様に
マジックを
巻き付ける。

※ 上下どちらから取付けても、問題ありません

- ③ 補強の為に、
面ファスナーを
上から巻き付け
取付け完了！！

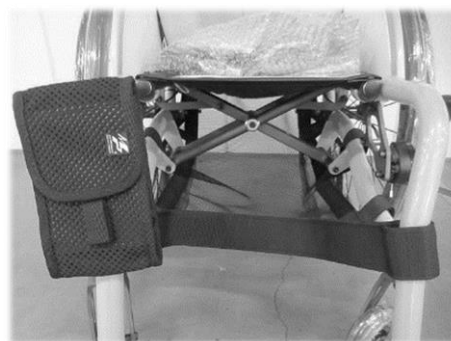

お手入れ方法

- 洗濯機を使用する場合は、ネットに入れ、手洗いモードで洗濯してください。
- 掃除する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、汚れ・ホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。

⚠ 注意

- 取付けは、平坦な安全な場所で行ってください。
- 必ず、ブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。
- 十分な取付けスペースが無い場合、スマートフォンケース本体の歪みにつながる恐れがあります。
- スマートフォン入れ以外の目的では使用しないでください。
- 走行中に中身が落ちないよう、ふたがしっかりと固定されているか確認してください。
- 車椅子を折りたたむ・積み込む際には、中身を取り出してから行ってください。
フレームで挟み、破損や中身が落下する恐れがあります。
- 面ファスナーにゴミや髪の毛が付着すると、粘着力が弱くなり、ケースが外れる原因となります。
定期的にとりのぞいてください。
- 貴重品を入れないでください。紛失・盗難の原因となります。
- 下側 35mm程空いているため、小さな物を入れると落下します。

