

オアシス・マイチルトコンパクト用テーブル取付け・説明書

この度は、車いす用テーブルをお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください

安全にお使いいただくために

車いす用テーブルは、アームサポート前方に固定し、読書・食事等に使用します。荷物の運搬等には絶対に使用しないでください。

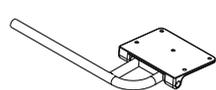
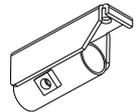
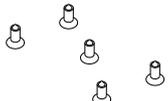
テーブル使用中は、水等がこぼれると衣服を汚す恐れがあります。また、熱いお茶などをこぼすとやけどの原因となりますので、十分に注意してご使用ください。

取り付け可能な車いす

- オアシスシリーズ
- マイチルトコンパクト

構成部品

下記の部品が同梱されているかご確認ください。

No.	①	②	③	④	⑤
品名	テーブル	テーブルステー	ホルダー	ノブボルト	皿タッピンネジ
数量	1	1	1	1	5
外観					

※③ホルダーは右側用と左側用があります。(形状が左右対称)

必要工具

○六角レンチ(対辺3mm) … アームサポートにホルダーを取付ける際に使用します。

○プラスドライバー … テーブルステーにテーブルを取付ける際に使用します。

※電動工具は使用しないでください(テーブル等を破損する恐れがあります)。

取付け前に

取付けは平坦で安全な場所で行ってください。

車いすは折りたたんだ状態ではなく、開いた状態で行ってください。

必ずブレーキをロックし、車いすが動かない状態で行ってください。

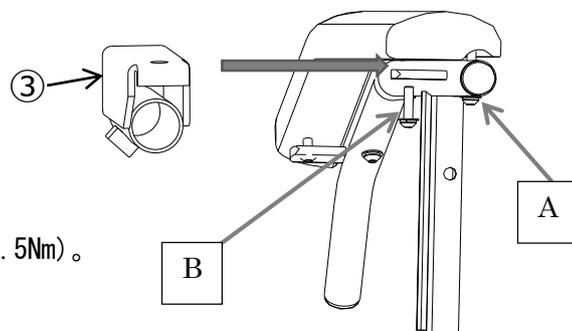
取付け方法

ホルダー③は右側用と左側用で形状が異なります。必ずどちらかを確認をして取付けて下さい。

ホルダーの取付け方法


※図は右用を示しています。

1. 車いすのアームサポート固定ボルト A を緩めます
2. アームサポート固定ボルト B を取り外します。
3. ホルダー③を右図のように肘パッドとフレームの間にネジ穴を
合わせて挟み込み、固定ボルト B で固定します(トルク : 2.5~3.5Nm)。
4. 固定ボルト A を締めます(トルク : 2.5~3.5Nm)。
5. 取付けたホルダー③にガタツキがないことを確認してください。



テーブルの固定方法

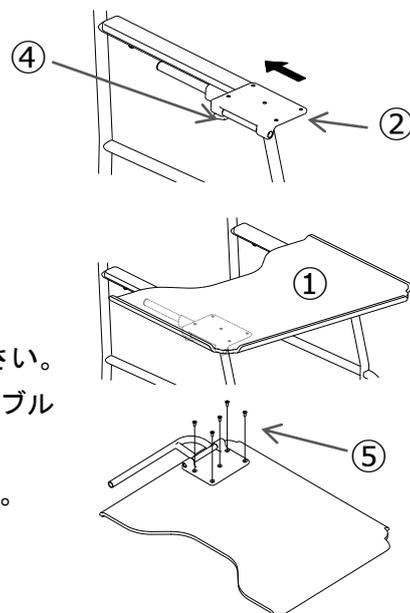1. テーブルステー②をホルダー③に肘パッド先端まで差し込みます。この時、
テーブルステーの樹脂プレートが肘パッド上面で接触し、水平になるよう
に位置を調整して、ノブボルト④で固定してください。
2. 車いす使用者が自然な座位姿勢となるように、テーブル①を
アームサポート上に左右均等に置きます。
3. テーブルの裏側から樹脂プレートを固定する位置に「しるし」を付けてください。
4. テーブルステーとテーブルを一度取り外し、3. でつけたしるしの位置にテーブル
を 5 本の皿タッピンネジ⑤で固定します。
5. テーブルを取り付けたステーをホルダーに差し込み、ノブボルトで固定します。
6. テーブル位置を確認し、ガタツキが無いことを確認してください。



⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、損害を追う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- ・取付け後は、テーブル・テーブルステー・ホルダーが確実に固定されていることを確認してください。
- ・無理に取付けを行うと、使用中にテーブルが外れたり、各部品が破損する恐れがありますので、その際にはお買い上げいただいた販売店 または (株)松永製作所までお問い合わせください。
- ・この製品は、読書や食事等に使用する、車いす専用のテーブルとして設計しております。荷物の運搬等、その他の目的では使用しないでください。
- ・テーブル使用中は、水等がこぼれると衣服を汚す恐れがあります。また、熱いお茶等をこぼすとやけどの原因になりますので十分に注意してご使用ください。

テーブル・ステー・ホルダーのお手入れ方法

- ・清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり汚れをふき取った後、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- ・揮発性剤(シンナー・ベンジン・アルコール類)は使用しないでください。(変色・劣化の原因になります。)



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484

TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270

URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

2016.4