


後付けアームサポート 取付け・取扱説明書

このたびは、後付けアームサポートをお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

適用範囲


形状 アームサポートパイプサイズ 20mm
寸法 アームサポート取付け穴間隔(中心～中心)寸法が235mm

寸法規格

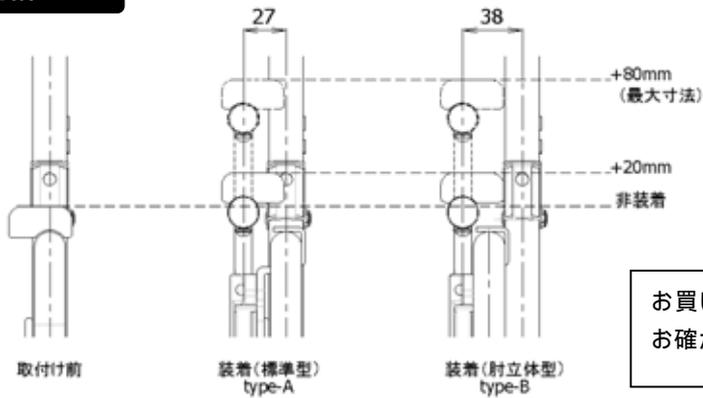

お買い上げいただいた商品のタイプをお確かめください。




各部の名称

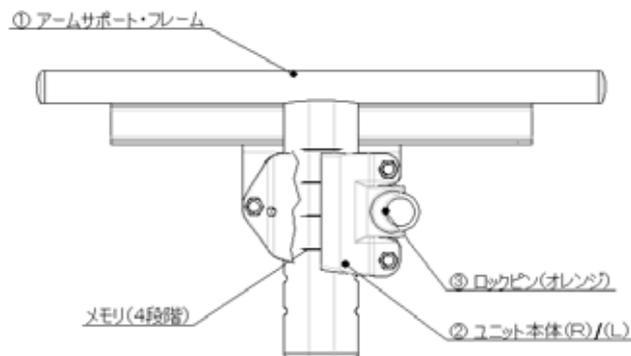


付属部品	
④	ボタンボルト 4本
⑤	皿ボルト 4本
⑥	ナット 4個
⑦	車輪用ワッシャー 4個


注) 開梱後は必ず、部品数量をご確認ください。

取付け手順

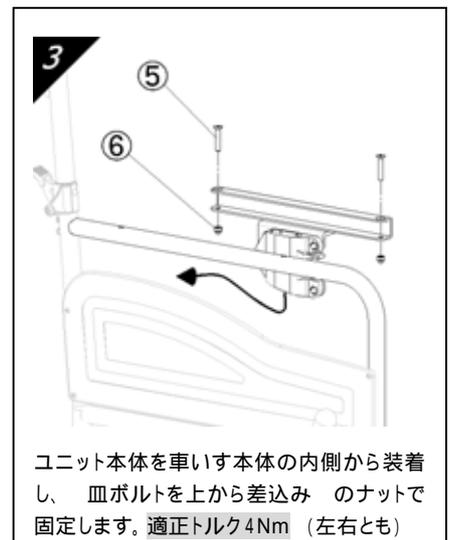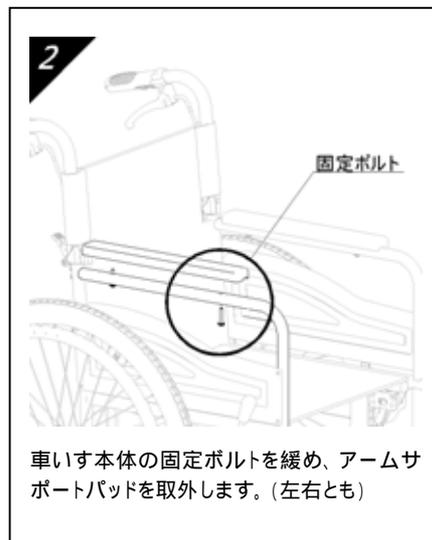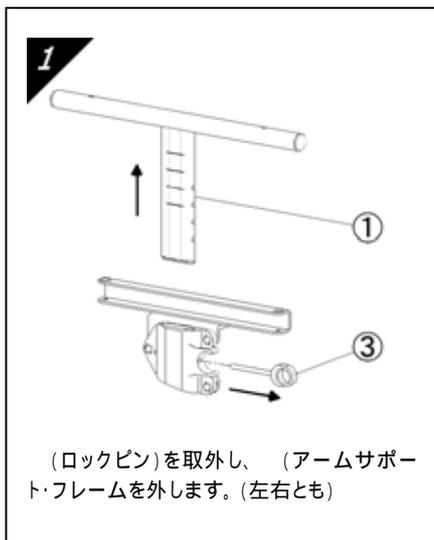


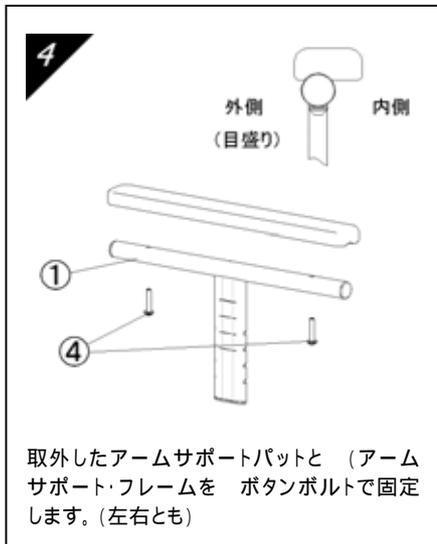


取外したアームサポートバットと（アームサポート・フレームを ボタンボルトで固定します。（左右とも）

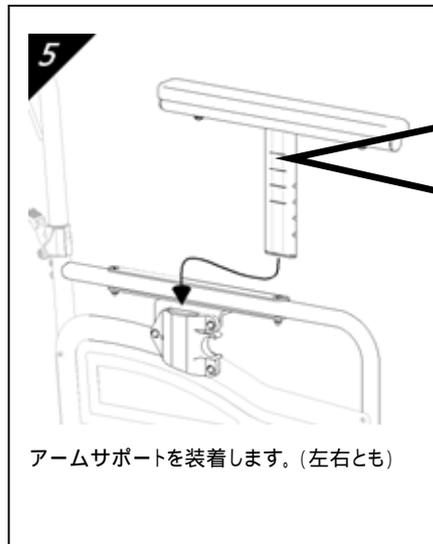

アームサポートを装着します。（左右とも）

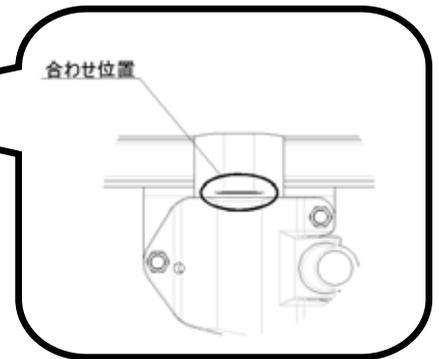


お好みの高さの合わせ位置を樹脂の上面に合わせます。

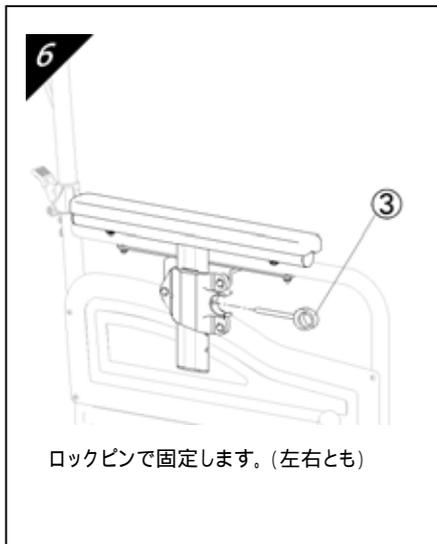

ロックピンで固定します。（左右とも）





取付け後は、アームサポートのガタつき、ゆがみを確認してください。

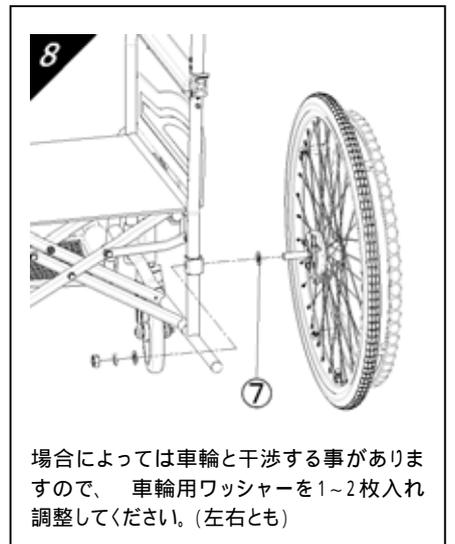

場合によっては車輪と干渉する事がありますので、車輪用ワッシャーを1~2枚入れ調整してください。（左右とも）

使用上の注意

○ ロックピンの固定方法

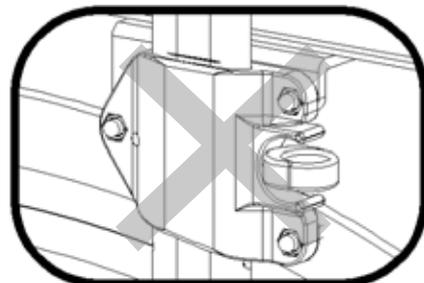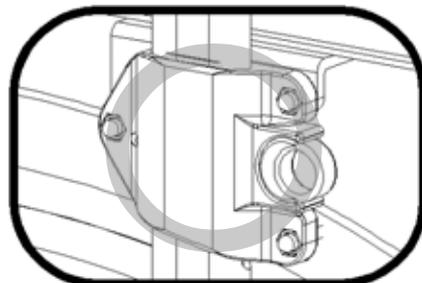

注意

ロックピンは適正な位置で装着してください。必ず奥まで入っていることを確認してください。
アームサポートが抜けたり、脱落しケガをする原因となります。
アームサポートを持って持ち上げないでください。

お手入れ方法

- 清掃する場合は、水につけたタオルをしぼり、泥やホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- 揮発性剤（シンナー ベンジン アルコール類）は使用しないでください。（変色 劣化の原因となります。）