

<車いす用テーブル(前後調整式)取付け・取扱説明書>

このたびは、車いす用テーブルをお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

安全にお使いいただくために

車いす用テーブルは、アームサポート前方に固定し、読書・食事などに使用します。


荷物の運搬等には絶対に使用しないで下さい。

テーブル使用中は、水などがこぼれると衣服を汚す恐れがあります。また、熱いお茶等をこぼすとやけどの原因となりますので、十分に注意して使用してください。

取付け可能な車いす

取付け前に、下記の条件を確認していただき、取付け可能かどうか確認してください。

- 自走用または介助用の車いすで、アームサポート（肘掛け）がある車いす。
- アームサポートパイプ（肘掛けパイプ）の直径が、 $\phi 22\text{mm}$ までのもの。
（ $\phi 22\text{mm}$ 以上の場合 … 取付けステーが破損する可能性があります。）
- アームサポート固定ボルトが、M5ボルトを使用しているもの。
- アームサポート固定ボルトの前後30mmは、パイプがまっすぐであるもの。

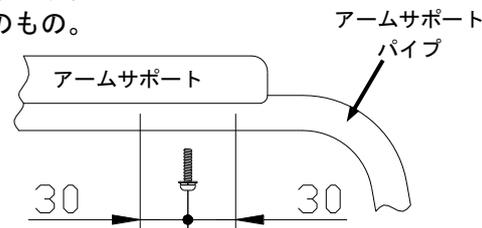

構成部品

下記の部品が同梱されているかどうか確認してください。

No.	部品名	数量	備考
①	テーブル	1	
②	テーブルステー	1	パイプ・樹脂プレート組立品(右側取付け用)
③	ホルダー	1	
④	ノブボルト	1	バネ付
⑤	座金組込みボルト A	1	M5×35mm
⑥	座金組込みボルト B	1	M5×40mm
⑦	皿タッピンねじ	5	5×12mm

※ ④・⑤のボルトは、アームサポートパイプの径や、アームサポート（肘掛け）の種類により、適した方を使用してください。（標準で付いているボルトよりも5mmほど長い物が適しています）

※ アームサポートパイプの径、アームサポートの種類により、付属のボルトでは適さない場合がありますので、その場合には、お買い上げの販売店 または ㈱松永製作所までお問い合わせください。

取付け方法

<使用工具>

- 六角レンチ（対辺3mm）… アームサポートにホルダーを取付ける際に使用します。
 - プラスドライバー … テーブルステーにテーブルを取付ける際に使用します。
 - （● 六角レンチ（対辺5mm）… テーブルステーの左右を入れ替える場合に使用します。）
- ※ 電動工具の使用はご遠慮ください。（テーブルなどを破損する恐れがあります）
※ 弊社製車いす以外の場合は、ボルトを取り外すときに他の工具が必要となる場合があります。


<取付け前に>

取付けは、平坦な安全な場所で行ってください。
車いすが折りたたみ式の場合は、開いた状態で行ってください。
必ずブレーキをロックし、車いすが動かない状態で行ってください。

ご購入いただいた状態では、右側用にセットしてあります。左側で使用する場合は、下記の〈テーブルステーの左右変更方法〉を参照し、以下の文章・図の左右を入れ替えてお読みください。


〈ホルダーの取付け方法〉

1. 車いす右側のアームサポート固定ボルト（前側のみ）を取り外します。
2. 取り外したボルトよりも5mmほど長いボルト（⑤または⑥）を選択し、ホルダー③をボルトで固定します。
3. 取付けたホルダー③にがたつきがないか確認してください。

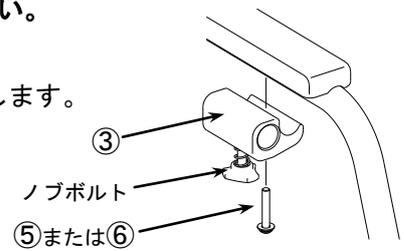

〈テーブルの固定方法〉


1. テーブルステー②をホルダー③にアームサポート（肘パット）先端まで差込みます。（このとき、樹脂プレートがアームサポート上面で接触し、水平になるように、ノブボルトを固定してください。）
2. 車いす使用者が自然な座位姿勢となるように、テーブル①をアームサポート上に左右均等に置きます。
3. テーブルの裏側から樹脂プレートを固定する位置に「しるし」を付けてください。（5ヶ所の穴または外形）
4. テーブルステーとテーブルを一度取り外し、3. で付けたしるしの位置にテーブルを5本の皿タッピンねじ⑦を使用し固定します。（このとき、電動工具の使用は避けてください。）
5. テーブルを取付けたステーをホルダーに差込み、ノブボルトで固定します。
6. テーブル位置を確認し、がたつきがないか確認してください。

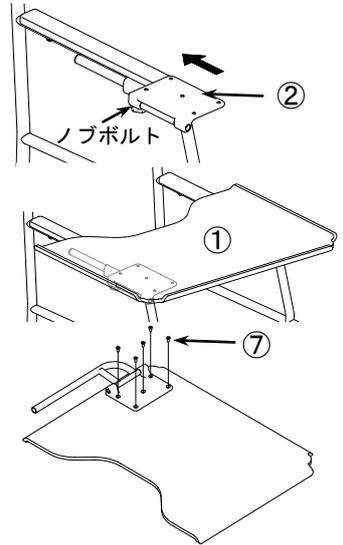

〈テーブルステーの左右変更方法〉

ご購入いただいた状態では、右側用でセットしてあります。左側で使いたい場合は下記の手順で変更してください。

1. テーブルステーの樹脂プレートのボルトを外し、引き抜きます。（反対側のナットを無くさないで下さい）
2. 樹脂プレートを取り外し、図のように組み替え、もう一度ボルトで固定してください。
3. 取付けた樹脂プレートにがたつきがないか確認してください。

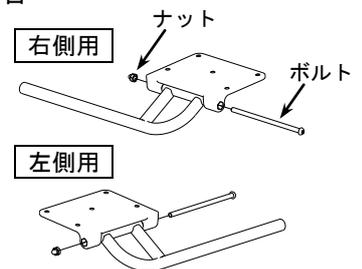

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- 取付け後は、テーブル・テーブルステー・ホルダーが確実に固定されていることを確認してください。
- 無理に取付けを行うと、使用中にテーブルが外れたり、各部品が破損する恐れがありますので、その場合にはお買い上げいただいた販売店 または 榊松永製作所までお問い合わせください。
- この製品は、車いす専用の読書、食事などに使用するテーブルとして設計しております。荷物の運搬など、その他の目的では使用しないでください。
- テーブル使用中は、水などがこぼれると衣服を汚す恐れがあります。また、熱いお茶等をこぼすとやけどの原因となりますので、十分に注意して使用してください。

テーブル（ステー・ホルダー）のお手入れの方法

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、汚れを拭き取った後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- 揮発性剤（シンナー・ベンジン・アルコール類）は使用しないで下さい。（変色・劣化の原因となります。）



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>