

# <車椅子用日除け 取扱説明書>

このたびは、車椅子用日除けをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。  
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- 取付け後は、日除けが確実に固定されていることを確認してください。
- 無理に取付けを行うと、使用中に日除けが外れ、使用者や介助者、周囲の方に当たりケガをする恐れがありますし、各部品が破損する恐れがあります。その場合にはお買い上げいただいた販売店 または (株)松永製作所までお問い合わせください。
- この製品は、車椅子専用の日除けとして設計しております。その他の目的では使用しないでください。  
(雨除けではありません)
- 日除けの上に物を載せたり、車椅子を動かす際の持手として使用しないでください。
- 風の強い日には屋外の使用は避けてください。
- 改造をしないでください。

## ●取付可能な車椅子●


取付け前に、下記の条件を確認していただき、取付け可能かどうか確認してください。

- 自走用または介助用の車椅子で、バックサポート(背もたれパイプ)があり、固定位置として50mm 以上パイプがまっすぐな部分があること。
- バックサポートパイプ(背もたれパイプ)の直径が、 $\phi 22\text{mm}$ までのもの。  
( $\phi 22\text{mm}$ 以上の場合 … 受金具が破損する可能性があります。)
- 固定部分にシートがある場合は、その厚みは5mm 以下であること。
- 固定位置は50mm 以上パイプがまっすぐであるもの。

## ●構成部品●

下記の部品が同梱されているかどうか確認してください。

| No. | 部品名           | 数量 |
|-----|---------------|----|
| ①   | 日除けシート        | 1  |
| ②   | 日除けフレーム       | 1  |
| ③   | フレキシブルパイプ     | 1  |
| ④   | 高さ調整パイプ       | 1  |
| ⑤   | 受金具(クイックバー含む) | 1  |
| ⑥   | 六角レンチ(対辺4mm)  | 1  |
| ⑦   | 六角レンチ(対辺3mm)  | 1  |

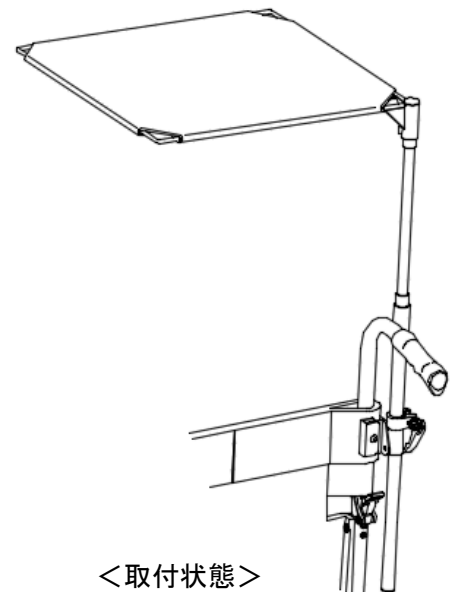

## ●取付方法●

### ＜使用工具＞


- 六角レンチ(対辺4mm)・・・ 車椅子に受金具を取付ける際に使用します。
  - 六角レンチ(対辺3mm)・・・ 日除けフレーム、フレキシブルパイプ、高さ調整パイプを接合する際に使用します。
- ※ 電動工具の使用はご遠慮ください。(部品を破損する恐れがあります)

### ＜取付前に＞

取付けは、平坦な安全な場所で行ってください。  
車椅子が折りたたみ式の場合は、開いた状態で行ってください。  
必ずブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。


### ＜日除けの組み立て方法＞ 止めねじ適正トルク：5.2Nm

1. 日除けフレームに日除けシートをかぶせ、四辺をマジックテープで止めます。
2. 高さ調整パイプにフレキシブルパイプを挿入し、止めねじを締めます。
3. フレキシブルパイプに日除けフレームを挿入し、止めねじを締めます。
4. 各部にがたつきがないか確認してください。

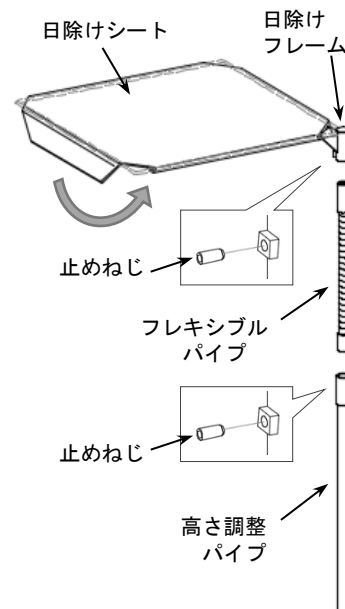

### ＜受金具の取付方法＞ ボルト適正トルク：5.2Nm


1. 受金具を車椅子右側のバックサポートパイプに挟み込みます。  
(このとき、受金具とバックサポートパイプが平行になるように、位置を調整してください。)
2. ボルトを締めて、がたつきが無いか確認してください。

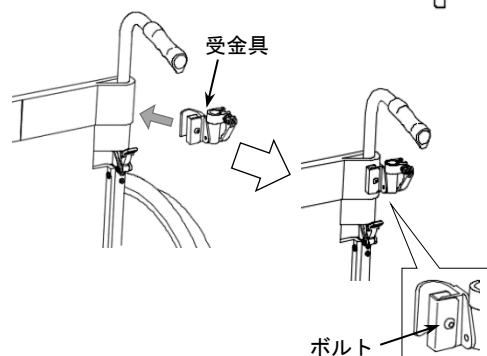

### ＜受金具へ日除けの取付方法＞

1. クイックレバーを解除します。
2. 受金具へ日除けの高さ調整パイプ部分を挿入します。
3. 日除けの高さを調整し、適当な位置でクイックレバーを倒し固定します。
4. 各部にがたつきが無いか確認してください。

※ クイックレバーを倒しても固定力が弱い場合は、クイックレバーを一旦解除し、ナットを少し締めて調整してください。

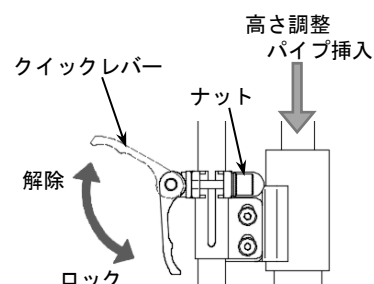

## ●日除け・受金具のお手入れ方法●

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、汚れを拭き取った後に、乾いた布で仕上拭きをしてください。
- 揮発性剤(シンナー・ベンジン・アルコール類)は使用しないで下さい。(変色・劣化の原因となります。)

お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL0584-35-1180(代) FAX0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>