

このたびは、「スポークカバー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

## スポークカバー



車椅子の操作時、回転している車輪のスポークに指を挟んで怪我をすることを防止します。

### 構成部品

下記の部品が同梱されているかどうか確認してください

部品名称	数量
 スポークカバー本体 (左右共通)	2
 クリップ	18
 ゴムワッシャー	18

### 取付け工具不要


#### 取付け前に

- 取付けは平坦な安全な場所で行ってください。
- 車椅子が折りたたみ式の場合は、いた状態で行ってください。
- 必ずブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。

### スポークカバーのお手入れ方法

- ・清掃する場合は、傷付き防止のため、柔らかいスポンジまたは柔らかい布を使用し、石鹼水で汚れを落としてから水洗いをしてください。
- ・ワックス類、コンパウンド入りのクリーニング剤は使用しないでください。

## 取付け方法

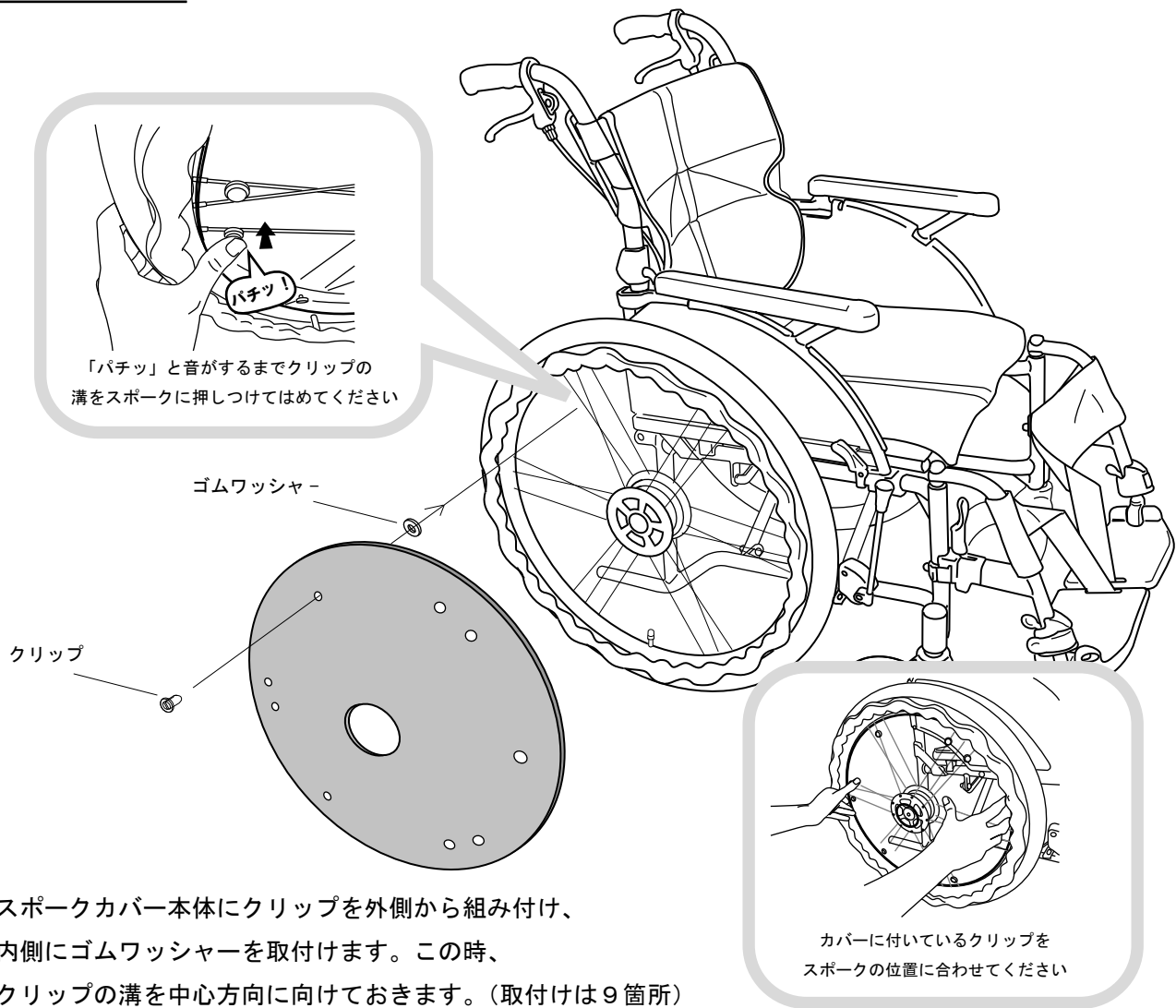

スポークカバー本体にクリップを外側から組み付け、内側にゴムワッシャーを取付けます。この時、クリップの溝を中心方向に向けておきます。(取付けは9箇所)

### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、損害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 装着後、取付け部にガタつきがないことを確認してください。
- スポークカバーへガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品を付着させないでください。ひび割れの原因になります。
- 破損、ひび割れしたスポークカバーは危険ですので交換してください。
- 取付けの際には充分注意して怪我しないようにしてください。
- 無理に取付けを行うと、使用中にスポークカバーが外れたり、破損する恐れがありますのでその場合はお買い上げいただいた販売店、又は（株）松永製作所までお問い合わせください