


OLive専用 抵抗器 取付け・取扱説明書

このたびは、抵抗器をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

各部名称

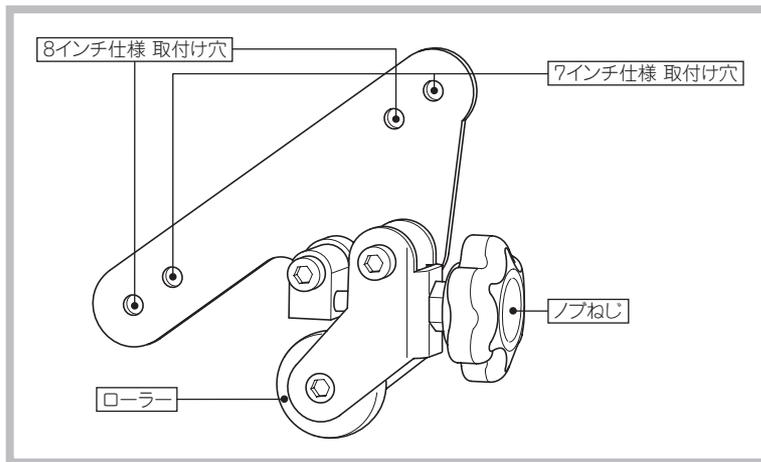

仕様により取付け穴が異なります。
キャストのサイズは以下になります。

7インチ仕様	φ180mm
--------	--------

8インチ仕様	φ205mm
--------	--------

取付け方法

使用工具

- スパナ (10mm)

※電動工具の使用はご遠慮ください。(OLive本体、抵抗器を破損する恐れがあります)

取付け前に

取付けは、平坦な安全な場所で行ってください。




必ずOLive本体を上げた状態で行ってください。

必ず取り付ける側と反対側のブレーキをロックし、OLive本体が動かない状態で行ってください。

抵抗器の取付け方法

※説明は右側へ取付けの場合です。左側も同様に取付けてください。

- 1 OLive本体を上げ、交換する側のブレーキは解除し、反対側のブレーキはかけてください。
(OLive本体の取扱説明書を参照してください。)
- 2 ブレーキを固定しているボルトを取り外し、ブレーキを外します。
- 3 取り外したボルトを使用し、抵抗器とブレーキを取付けます。
(キャストサイズにより抵抗器の穴位置が違いますので注意してください。)
- 4 キャスタとブレーキシューの間が3mmくらいになるように調整し、ボルトを締めてください。
- 5 ブレーキの効き具合を確認してください。
(微調整の方法はOLive本体の取扱説明書P.11ブレーキの調整を参照してください。)
- 6 各部にがたつきが無いか確認してください。

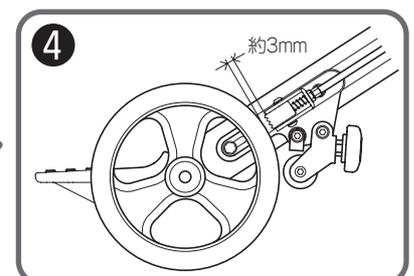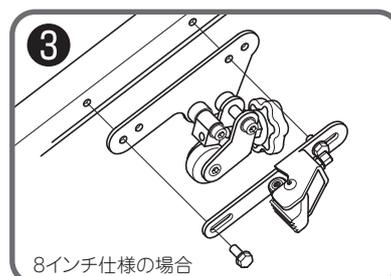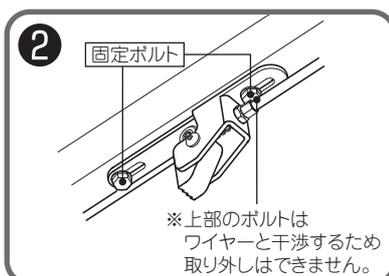


⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
(指をはさんだりしないように注意してください。)
- 取付け後は、抵抗器・ブレーキが確実に固定されていることを確認してください。
- ご使用前に必ずブレーキ(制動&駐車)の効きを確認してください。
- 無理に取付けを行うと、使用中に抵抗器やブレーキが破損したりする恐れがありますので、その場合にはお買い上げいただいた販売店または(株)松永製作所までお問い合わせください。

抵抗器の使用方法

抵抗器のノブを回し、抵抗の大きさを調整します。

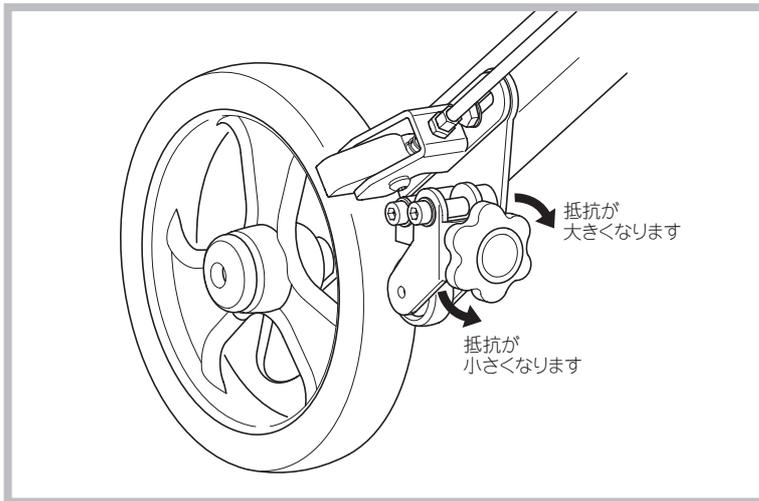

⚠ 注意

- 抵抗器をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。
- この製品は、OLive専用の抵抗器として設計しております。
その他の目的では使用しないでください。
- 改造などしないでください。
- 歩行器の車輪と抵抗器のローラーの間にゴミなどがはさまっていないか確認してください。
- 歩行器本体の取扱説明書も合わせてお読みください。

抵抗器のお手入れの方法

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、泥やホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上拭きをしてください。
- 揮発性剤(シンナー・ベンジン・アルコール類)は使用しないで下さい。(変色・劣化の原因となります。)



株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>