

# ノンスリップフットサポートカバー 取扱説明書

このたびは、(株)松永製作所製品のノンスリップフットサポートカバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。お客様が安全に正しくご使用していただくために必要な注意事項や正しい使い方が説明されています。ご使用になる前には、必ずお読みください。また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

## 梱包状態

○右図のように、1台分（2個入り）で梱包されていることをご確認ください



## 部品概要


○ノンスリップフットサポートカバーは筒状になっており、表（おもて）面と裏面があります。

表面は伸縮性と滑り止め機能があります。裏面にはその機能はないため、触って違いをご確認頂けます。

表（おもて）面	裏面
 <p>こちらを上側にして使用します。</p>	 <p>こちらを下側にして使用します。</p>
柄・特徴	柄・特徴
 <p>細かいドット柄になっています。 伸縮性があり、滑り止めの凹凸感があります。</p>	 <p>黒色の無地です。 伸縮性はなく、なめらかな手触りです。</p>

## 取付方法

※取付は、平坦で安全な場所で行ってください。

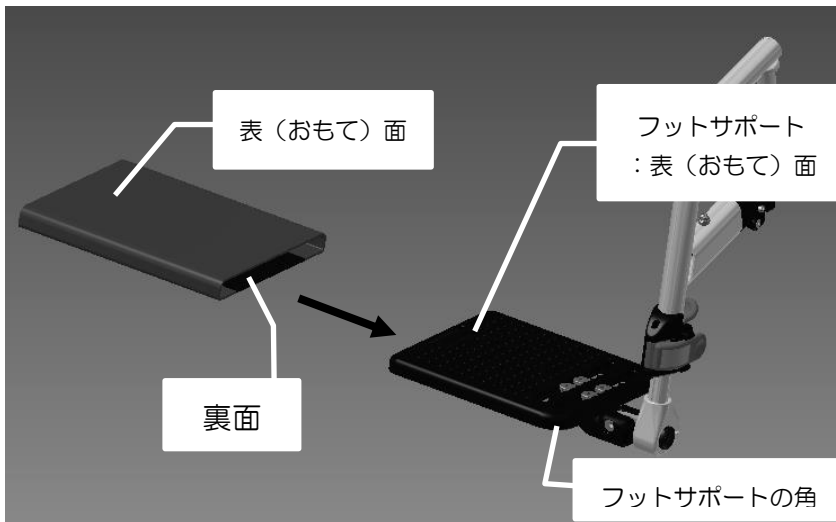


- ① 取付前に必ず、表（おもて）面と裏面の違い（部品概要参照）を確認してください。
- ② ノンスリップフットサポートカバーの表面が、フットサポートの表面にくるように取付けます。伸縮方向の両サイドを伸ばしながら行うと、はめやすいです。
- ③ フットサポートの角にかぶせる程度まではめてください。

### 【カバー布が余る場合】

ご使用いただいているフットサポートの種類によっては、右図のようにカバー布が余る場合があります。(MWタイプ/MA-2タイプ/FBタイプの各S,Mサイズなど) その場合は、フットサポートの裏面側で布を内側に折り込んでご使用ください。



#### カバー布の折り込み方

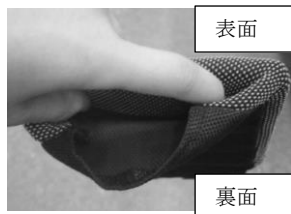

裏面で、余ったカバーを内側に折り込みます

### 【フットサポートベルトがある場合】

フットサポートベルトのあるものは、ベルト穴が見えるように、穴の手前で内側に折り曲げてください。

#### カバー布の折り込み方



ベルト穴が露出するように、カバーを内側に折り込みます



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- 取付け後は、カバーがフットサポートの角まではまっていることを確認してください。
- ご使用中、適時ずれが無いかなど、確認してご使用ください。
- 無理に取付を行うと、使用中に脱落したり、各部品が破損したりする恐れがあります。その場合には、お買い上げ頂いた販売店、または、(株)松永製作所までお問合せください。
- この製品は、フットサポートカバーとして設計しております。その他の目的で使用しないでください。

### お手入れ方法

- 石鹼・中性洗剤を使用しての洗濯、ドライクリーニングが可能です。乾燥の際は直射日光を避け、陰干ししてください。湿度の高い場所を避け、直射日光を避けた涼しい場所で保管してください。
- 塩素系漂白剤、揮発性剤(シンナー・ベンジン・アルコール類)は使用しないでください。(変色・劣化の原因となります。)
- アイロンをかける際は低温でご使用ください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>