

<車椅子用テーブル(前後式スチール固定タイプ)取扱説明書>

このたびは、車椅子用テーブル・取付部品(金具)をお買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。

また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。



注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- 取付け後は、テーブル・テーブルステー・受金具が確実に固定されていることを確認してください。
- 無理に取付けを行うと、使用中にテーブルが外れ、各部品が破損する恐れがありますので、その場合にはお買い上げいただいた販売店 または (株)松永製作所までお問い合わせください。
- この製品は、車椅子専用の読書、食事などに使用するテーブルとして設計しております。荷物の運搬など、その他の目的では使用しないでください。
- テーブルの耐荷重は、**30kg**です(正しい取付方法の場合)。ただし、テーブルの位置や物を載せる位置により車椅子ごと転倒したり、テーブルが外れたりする恐れがありますので、十分に注意して使用してください。
- テーブル使用中は、水などがこぼれると衣服を汚す恐れがあります。また、熱いお茶等をこぼすとやけどの原因となりますので、十分に注意して使用してください。

●取付可能な車椅子●

取付け前に、下記の条件を確認していただき、取付け可能かどうか確認してください。

- 自走用または介助用の車椅子で、アームサポート(肘パッド)がある車椅子。
 - アームサポートパイプ(肘掛けパイプ)の直径が、 $\phi 22\text{mm}$ までのもの。
($\phi 22\text{mm}$ 以上の場合 … 受金具が破損する可能性があります。)
 - アームサポート固定ボルトが、M5ボルトを使用しているもの。
 - アームサポート固定ボルトの前後30mmは、パイプがまっすぐであるもの。
- ※ アームサポートがデスクタイプには取付けできません。

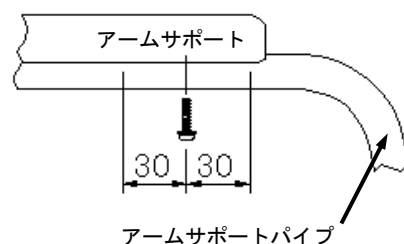

●構成部品●

下記の部品が同梱されているかどうか確認してください。

No.	部品名	数量
①	テーブル	1
②	テーブルステー	1(2)
③	受金具(ボルト含む)	1(2)
④	ノブボルト	1(2)
⑤	テーブル固定ビス	4(8)
()内の数量は左右 2 本使いの場合		

※ アームサポートパイプの径、アームサポートの種類により、付属のボルトでは適さない場合がありますので、その場合には、お買い上げの販売店 または (株)松永製作所までお問い合わせください。

●取付方法●

＜使用工具＞

- 六角レンチ(対辺3mm)・・・ アームサポートに受金具を取付ける際に使用します。
- プラスドライバー・・・ テーブルステーにテーブルを取付ける際に使用します。
- ※ 電動工具の使用はご遠慮ください。(テーブルなどを破損する恐れがあります)

＜取付前に＞

取付けは、平坦な安全な場所で行ってください。


車椅子が折りたたみ式の場合は、開いた状態で行ってください。

必ずブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。

テーブルステーは、左用・右用があります。取付前にご確認ください。




＜受金具の取付方法＞ 左右2本使いの場合は両側に固定してください。

1. 受金具取付側のアームサポート固定ボルト(2本とも)を取り外します。
2. アームサポートパイプとアームサポート(肘パッド)の間に受金具を挟み固定してください。
3. 取付けた受金具にがたつきがないか確認してください。

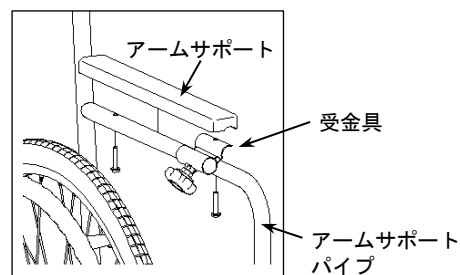

＜テーブルの固定方法＞ 左右2本使いの場合は両側に固定してください。

1. 受金具にテーブルステーを奥まで差込みます。
(このとき、ステー上面とアームサポート上面がほぼ同一面で水平になるように、ノブボルトを固定してください。)
2. 車椅子使用者が自然な座位姿勢となるように、テーブルをアームサポート上に左右均等に置きます。
3. テーブルの裏側からテーブルステーを固定する位置に「しるし」を付けてください。(4ヶ所の穴または外形)
4. テーブルステーとテーブルを一度取り外し、3. で付けたしるしの位置にテーブルを4本の固定ビスを使用し固定します。
(このとき、電動工具の使用は避けてください。)
5. テーブルを取付けたステーを受金具に差込み、ノブボルトで固定します。
6. テーブル位置を確認し、がたつきがないか確認してください。
7. 肘パッドの上にテーブルが2/3以上載っていることを確認してください。

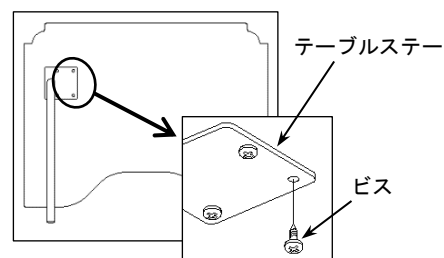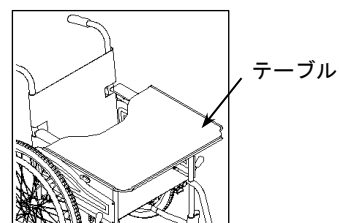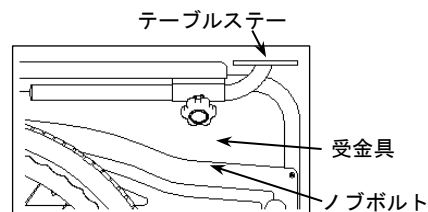

●テーブル・ステー・受金具のお手入れ方法●

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、汚れを拭き取った後に、乾いた布で仕上拭きをしてください。
- 揮発性剤(シンナー・ベンジン・アルコール類)は使用しないで下さい。(変色・劣化の原因となります。)

お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。



株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL0584-35-1180(代) FAX0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>