

# <車椅子用テーブル(マジック式)取扱説明書>

このたびは、車椅子用テーブル・取付部品(マジック式)をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。  
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。



## 注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- 取付け後は、テーブルが確実に固定されていることを確認してください。
- 無理に取付けを行うと、使用中にテーブルが外れ、各部品が破損する恐れがありますので、その場合にはお買い上げいただいた販売店 または (株)松永製作所までお問い合わせください。
- この製品は、車椅子専用の読書、食事などに使用するテーブルとして設計しております。荷物の運搬など、その他の目的では使用しないでください。
- テーブルの耐荷重は、**30kg**です(正しい取付方法の場合)。ただし、テーブルの位置や物を載せる位置により車椅子ごと転倒したり、テーブルが外れたりする恐れがありますので、十分に注意して使用してください。
- テーブル使用中は、水などがこぼれると衣服を汚す恐れがあります。また、熱いお茶等をこぼすとやけどの原因となりますので、十分に注意して使用してください。
- マジックテープに付いた糸くずや汚れを取り除いてください。粘着力が弱くなりマジックテープが外れやすくなります。

## ●取付可能な車椅子●

取付け前に、下記の条件を確認していただき、取付け可能かどうか確認してください。

- 自走用または介助用の車椅子で、アームサポート(肘パッド)がある車椅子。
  - アームサポート固定ボルトの前後30mmは、パイプがまっすぐであるもの。
- ※ アームサポート上下式およびデスクタイプには取付けできません。

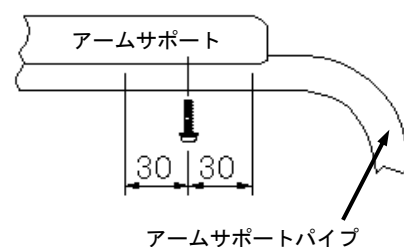

## ●構成部品●

下記の部品が同梱されているかどうか確認してください。

No.	部品名	数量
①	テーブル	1
②	マジックベルト	4
③	テーブル固定ビス	4
④	テーブル固定ワッシャ	4

※ アームサポートパイプの径、アームサポートの種類により、適さない場合がありますので、その場合には、お買い上げの販売店 または (株)松永製作所までお問い合わせください。

## ●取付方法●

### <使用工具>

- プラスドライバー … テーブルを取付ける際に使用します。
- ※ 電動工具の使用はご遠慮ください。(テーブルなどを破損する恐れがあります)

## ＜取付前に＞


取付けは、平坦な安全な場所で行ってください。

車椅子が折りたたみ式の場合は、開いた状態で行ってください。

必ずブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。

## ＜テーブルの固定方法＞

1. 車椅子使用者が自然な座位姿勢となるように、テーブルをアームサポート上に左右均等に置きます。
2. テーブルの裏側からテーブルを固定する位置に「しるし」を付けてください。（肘パッドの外側）
3. テーブルを一度取り外し、2. で付けた「しるし」の位置の内側（肘パッドの幅の半分程度を空け）にマジックベルトを固定ワッシャと固定ビスを使用し固定します。  
（このとき、電動工具の使用は避けてください。）
4. テーブルに取付けたマジックベルトでアームサポートに巻き付け固定します。
5. テーブル位置を確認し、がたつきがないか確認してください。
6. 肘パッドの上にテーブルが2/3以上載っていることを確認してください。

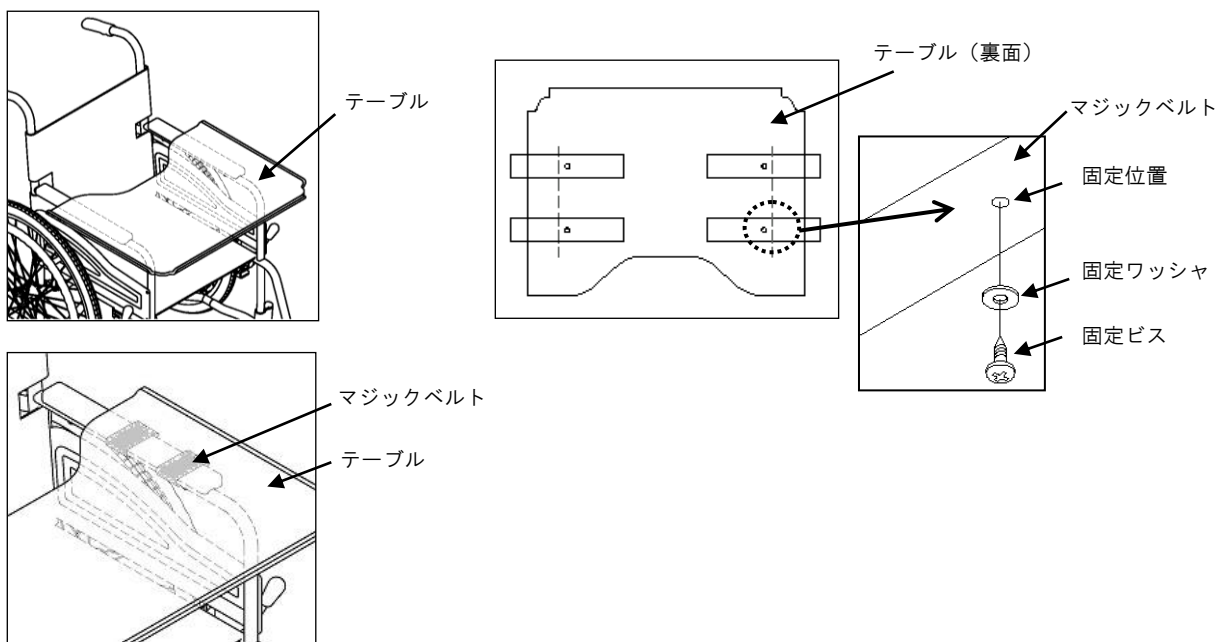

## ●テーブルのお手入れ方法●

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、汚れを拭き取った後に、乾いた布で仕上拭きをしてください。
  - 揮発性剤（シンナー・ベンジン・アルコール類）は使用しないで下さい。（変色・劣化の原因となります。）
  - マジックテープに付いた糸くずや汚れを取り除いてください。粘着力が弱くなりマジックテープが外れやすくなります。
- 
- お買い上げの製品は、改良等により、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
  - ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

愛の輪  
愛のいす



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL0584-35-1180(代) FAX0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>